

# ELEKTRYCZNY CZYŚCIK DO USZU

## MODEL: OME01

PL

instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup tego urządzenia. Przed użyciem produktu prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość

### Ostrzeżenie:

Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję użytkownika tego produktu, aby uniknąć niewłaściwego użycia, które mogłoby mieć nieprzyjemne konsekwencje.

### Opis produktu

1. Pokrywa zbiornika na wodę
2. Dysza natryskowa
3. Włączanie/wyłączanie
4. Przycisk trybu
5. Kontrolka wyświetlacza
6. Zbiornik na wodę
7. Złącze ładowania typu C
8. Osłona ucha

### Specyfikacja

Tryb czyszczenia: 4 tryby


Niski poziom hałasu: ≤65 dB

Czas ładowania: ok. 5 godzin

Materiał: ABS

Napięcie wejściowe: DC5V 1 A

Moc: 3 W

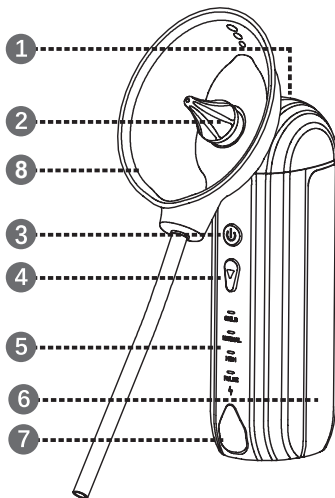

### Naprawy i konserwacja:

Czyszczenie: Po użyciu wylej pozostałą ciecz ze zbiornika i wytrzyj suchym ręcznikiem, umieść w chłodnym i wentylowanym miejscu. Dyszę można dezynfekować alkoholem 75%, nie dezynfekować w wysokiej temperaturze ani pod wysokim ciśnieniem.

### Ostrzeżenie:

Do płukania używaj ciepłej wody o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała (tj.  $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$  ( $95^{\circ}\text{F} - 102^{\circ}\text{F}$ )). Możesz także dodać roztwór soli fizjologicznej lub inny roztwór zalecany przez lekarza.

Jeśli twoje ucho jest zainfekowane, produkt należy stosować wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Produkt nie może być używany przez dzieci poniżej 8 lat.

Nie pozwalaj dzieciom używać produktu samodzielnie – muszą być pod opieką osoby dorosłej, aby mogły go bezpiecznie używać.

Zaleca się wymianę dyszy co 3 miesiące.

Nowi użytkownicy powinni podczas pierwszego użycia wybrać tryb dziecięcy, szczególnie jeśli mają wrażliwe uszy.

Jeśli po użyciu czujesz, że w przewodzie słuchowym pozostała woda, możesz spróbować ponownie użyć trybu dziecięcego lub normalnego do przepłukania. Gdy poczujesz wypływającą wodę, przerwij.

### Zastosowanie:

1. Skieruj dyszę do przewodu słuchowego i przyłóż osłonę ucha do ucha.

2. Wybierz żądany tryb, a następnie włącz produkt.


### Uwaga

Przed użyciem przeczytaj instrukcje, ostrzeżenia i wskazówki na odwrocie. Czyść starannie.


1. Nie używaj tego produktu, jeśli masz zapalenie, perforację błony bębenkowej lub jakiegolwiek urazu ucha.
2. Jeśli podczas używania poczujesz ból, natychmiast przerwij używanie.
3. Dzieciom poniżej 8 lat nie wolno używać tego produktu. Osoby niepełnoletnie powyżej 8 lat mogą go używać tylko pod nadzorem opiekuna.
4. Ten produkt nie jest zabawką, przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
5. Produkt posiada wbudowaną baterię, której nie wolno narażać na ogień, wilgoć ani wysoką temperaturę, ponieważ może eksplodować wskutek przegrzania.
6. Jeśli nie używasz produktu, upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, a wtyczka odłączona.
7. Nie używaj wody ani cieczy czyszczącej o temperaturze niższej niż temperatura ciała, ponieważ może to powodować zawroty głowy lub inne dolegliwości.
8. Nie demontuj produktu samodzielnie.
9. Części zamienne oraz produkt po upływie okresu eksploatacji należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi urządzeń elektronicznych, aby chronić środowisko.
10. Nie używaj produktu podczas ładowania.
11. Nie wprowadzaj do otworu odpływowego substancji chemicznych ani ciał stałych, takich jak włosy, gdyż mogą spowodować zatkanie lub uszkodzenie produktu.

### Użycie produktu

1. Zgodnie z ilustracją poniżej zamontuj osłonę ucha i wymaganą dyszę:

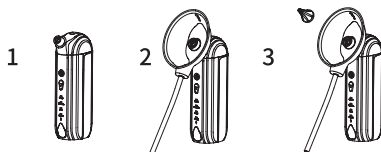

2. Do zbiornika na wodę dodaj ciepłą wodę o temperaturze zbliżonej do temperatury ciała lub temperaturze wody ( $37^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ), lub dodaj do zbiornika roztwór soli fizjologicznej albo inny roztwór zalecany przez lekarza.

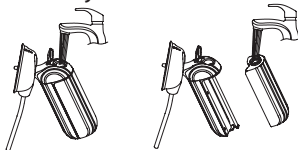

3. a) Skieruj dyszę do przewodu słuchowego i przyłóż osłonę ucha możliwie najciaśniej do małżowiny usznej.

b) Wybierz żądany tryb (rodzaje trybów patrz niżej), a następnie włącz produkt.



4. Jak ładować: Gdy kontrolka baterii miga na czerwono, otwórz gniazdo ładowania typu C i ładuj (ok. 3–5 godzin), aż kontrolka baterii zaświeci n



## **Cztery tryby ustawienia ciśnienia dla różnych potrzeb różnych osób podczas czyszczenia uszu:**


Dziecięcy – Łagodny strumień wody, delikatne czyszczenie zalecane dla dziecka powyżej 8 lat lub przy pierwszym użyciu.

Normalny – Standardowy strumień wody, wygodny do codziennego czyszczenia

Silny – Silny strumień wody, skuteczne czyszczenie

Pulsacyjny – Naprzemienne silne i słabe, głębokie czyszczenie

## **Akcesoria produktu:**

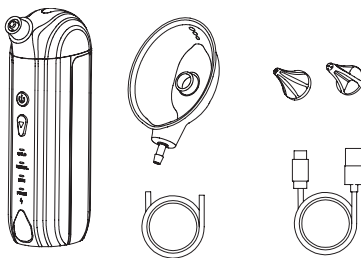

## **Ochrona środowiska**

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu eksploatacji produktu lub gdy jego naprawa stała się nieopłacalna, nie wyrzucaj produktu do odpadów domowych. W celu prawidłowej utylizacji oddaj produkt do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Prawidłowa utylizacja pomaga chronić cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogą wynikać z niewłaściwego usuwania odpadów. Dalsze informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Baterii nie wolno wyrzucać do odpadów komunalnych — należy oddać je do miejsc zapewniających recykling baterii.

## **Serwis**

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek wady po zakupie produktu skontaktuj się z działem serwisowym. Podczas używania produktu stosuj się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeśli produkt został zmodyfikowany lub jeśli nie przestrzegano instrukcji obsługi.

## **Gwarancja nie obejmuje:**

- naturalnego zużycia funkcjonalnych części produktu w wyniku jego normalnego użytkowania
- interwencji serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części ulegających zużyciu)
- wad spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem, niewłaściwym użyciem itp.)
- uszkodzeń mechanicznych wskutek upadku produktu, uderzenia, wstrząsu itp.
- szkód wynikłych z nieprawidłowego obchodzenia się lub używania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeciążenia, stosowania niewłaściwych lub nieoryginalnych części, akcesoriów bądź narzędzi
- szkód powstałych wskutek użycia nieoryginalnych adapterów lub użycia oryginalnego adaptera do innego produktu. Zawsze należy zachować kompatybilność w ramach jednego produktu.

W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, ryzyko szkody ponosi wyłącznie właściciel. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za możliwe błędy drukarskie. Ilustracje i opisy mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu.