

ULTRADŹWIĘKOWY INHALATOR




MODEL: SY308

PL

instrukcja obsługi

Szanowni klienci,
dziękujemy za zaufanie, jakie okazaliście nam, kupując ten produkt. Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią produktu. Zawiera ważne wskazówki dotyczące uruchomienia produktu i jego obsługi

Użycie:

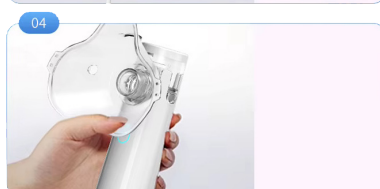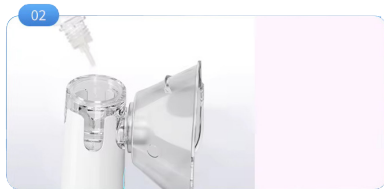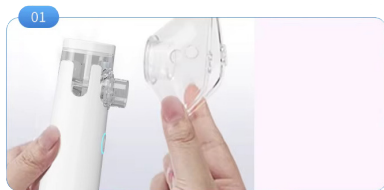

01) Włóż baterie lub podłącz kabel USB. Obracając przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, otwórz pokrywę w górnej części inhalatora.

02) Napełnij płyn do inhalacji lub czystą wodę. Zamknij pokrywę.

03) Zainstaluj maskę lub ustnik.

04) Naciśnij przycisk zasilania, aby rozpocząć inhalację. Powtarzając naciskanie, możesz ustawić 3 poziomy mocy. Po czwartym naciśnięciu inhalator się wyłączy.

Zawartość opakowania:

1. Ultradźwiękowy inhalator
2. Maska inhalacyjna dla dorosłych
3. Maska inhalacyjna dla dzieci
4. Ustnik do inhalacji ustami
5. Kabel USB do zasilania

Dane techniczne:

Zasilanie: 2 × 1,5 V baterie AA lub USB DC 5V/2A

Pojemność zbiorniczka: maks. 8 ml

Wydajność inhalacji: 0,2 ml/min (poziom 1)

Temperatura płynu do inhalacji: maks. 41°C

Ochrona środowiska

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu eksploatacji produktu lub w momencie, gdy naprawa byłaby

nieekonomiczna, nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych. W celu prawidłowej

utylizacji oddaj produkt do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie będzie przyjęty bezpłatnie. Prawidłowa utylizacja pomaga chronić cenne zasoby naturalne oraz zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia człowieka, które mogą wynikać z niewłaściwego usuwania odpadów. Dalsze szczegóły uzyskasz w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Baterii nie należy wyrzucać do zwykłych odpadów — oddaj je do punktów zapewniających recykling baterii.

Serwis

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek wady po zakupie produktu skontaktuj się z działem serwisowym.

Podczas używania produktu należy stosować się do wskazówek zawartych w dołączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uwzględniona, jeśli produkt został zmodyfikowany lub jeśli nie stosowano się do instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia funkcjonalnych części produktu w wyniku jego normalnego użytkowania
- interwencji serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części ulegających zużyciu)
- wad spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem, niewłaściwym użyciem itp.)
- uszkodzeń mechanicznych w wyniku upadku produktu, uderzenia, wstrząsu itp.
- szkód wynikłych z nieprawidłowego obchodzenia się lub używania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeciążenia, używania niewłaściwych lub nieoryginalnych części, niewłaściwych akcesoriów lub narzędzi itp.
- szkód powstałych wskutek użycia nieoryginalnych adapterów lub użycia oryginalnego adaptera do innego produktu. Zawsze należy zachować wzajemną kompatybilność w ramach jednego produktu.

W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały właściwie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, ryzyko wszelkich szkód ponosi wyłącznie właściciel. Dostawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za ewentualne błędy drukarskie. Ilustracje i opisy mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu