

ELEKTRYCZNA OPASKA NA KOLANO PODGRZEWAN

PL

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,
dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Nagrzewa się w ciągu kilku sekund, utrzymuje kolana w cieple, można używać także na łydkach, udach.

Wygodne użytkowanie

Boczna siateczkowa kieszeń do przechowywania zimnych okładów

Sterowanie jednym przyciskiem – trzy poziomy ustawienia temperatury:

Bardzo łatwa obsługa, temperaturę i czas nagrzewania możesz kontrolować samodzielnie.

Przycisk zasilania z diodą LED

czerwone – najwyższa temperatura / niebieskie – średnia / zielone – najniższe ustawienie temperatury

Jednym krótkim naciśnięciem przycisku możesz przejść na inny stopień nagrzewania

Dwa paski, zapięcie na rzep.

Opaska może być owinięta i przymocowana w dowolnej pozycji nóg lub ramion, gdzie potrzebujesz okładu ciepłego. Nie musisz już trzymać jej w dłoni. Dostarczana z kablem zasilającym USB. Można ją podłączyć do dowolnego źródła zasilania z portem USB, takiego jak powerbanka, PC, laptop, komputer stacjonarny czy ładowarka samochodowa. Ciepłe kolano możesz mieć w wielu sytuacjach – podczas chodzenia, jazdy lub pracy w biurze.

Parametry techniczne:

Wyściowe napięcie USB: 5V/DC

Pierwszy poziom grzania (czerwone światło) temperatura ok. 44°C

Drugi poziom grzania (niebieskie światło) temperatura ok. 41°C

Trzeci poziom grzania (zielone światło) temperatura ok. 38°C

Ochrona środowiska

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa byłaby nieopłacalna, nie wyrzucaj produktu

do odpadów komunalnych. W celu prawidłowej utylizacji oddaj produkt do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Prawidłowa utylizacja pomaga chronić cenne zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym

wpływom na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłyby być skutkiem niewłaściwej utylizacji odpadów. Zasięgnij dalszych informacji

u lokalnego urzędu lub w najbliższym punkcie zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą

zostać nałożone kary zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek wady po zakupie produktu skontaktuj się z działem serwisowym. Podczas użytkowania produktu postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uwzględniona, jeśli produkt został zmodyfikowany lub jeśli nie postępowałeś zgodnie z instrukcją obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia funkcjonalnych części produktu w wyniku jego normalnego użytkowania
- interwencji serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających zwykłemu zużyciu)
- usterek spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem, niewłaściwym użyciem itp.)
- uszkodzeń mechanicznych w wyniku upadku produktu, uderzenia, wstrząsu itp.
- szkód powstałych wskutek nieprawidłowego użytkowania lub używania produktu niezgodnie z instrukcją
- obsługi, przeciążenia, stosowania niewłaściwych lub nieoryginalnych części, używania niewłaściwych lub nieoryginalnych akcesoriów czy niewłaściwych narzędzi itp.
- szkód powstałych wskutek używania nieoryginalnych adapterów lub używania oryginalnego adaptera do innego produktu. Zawsze należy zachować pełną kompatybilność w ramach jednego produktu.

Za reklamowane produkty, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym podczas transportu, ryzyko ewentualnych szkód ponosi wyłącznie właściciel. Dostawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za ewentualne błędy drukarskie. Ilustracje i opis mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu