

STABILIZATOR STAWU BIODROWEGO


PL

instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie,

dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu. Zawarte są w niej istotne zalecenia dotyczące eksploatacji i obsługi produktu. Przekazując produkt innemu użytkownikowi, należy przekazać mu także instrukcję obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości!

Sposób użycia:

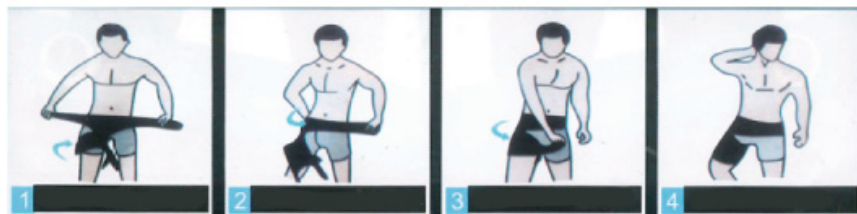

1. Przygotowana orteza na rzep do aplikacji
2. Główny pasek owija się wokół pasa
3. Przymocuj dolną część udowej wkładki za rzep wokół uda
4. Przymocuj górną część udowej wkładki rzepem wokół uda

Czas użytkowania:

Upewnij się, że produkt nie jest nieprzyjemnie ciasny i że nie jest ograniczony przepływ krwi. Nie używaj jej przez dłuższy czas.

Używaj wyłącznie na czystą i nieuszkodzoną skórę. Nie używaj, jeśli masz alergię na którykolwiek z wymienionych materiałów. Nie używaj, jeśli na miejscu zastosowania były aplikowane żele, kremy lub inne substancje)

Czyszczenie:



Ręczne pranie w zimnej wodzie (nie używaj płynu do zmiękczenia tkanin). Suszenie na płasko. Nie suszyć w suszarce ani czyścić chemicznie.

Nie wybielać, nie prasować, przechowywać w chłodnym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych.

Dane techniczne

UNIERSALNY ROZMIAR. ODPOWIEDNI NA LEWĄ LUB PRAWĄ NOGĘ.

REGULOWANY ROZMIAR.

SKŁAD: ODDYCHAJĄCY NEOPREN BEZ LATEKSU, NYLON, SPANDEX I POLIESTER

Ochrona środowiska

Po upływie okresu użytkowania produktu lub w momencie, gdy naprawa jest nieopłacalna, nie wyrzucaj produktu do śmieci domowych. W celu prawidłowej utylizacji produktu należy go oddać w wyznaczonych punktach zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych,
- uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego posługiwania się produktem, używania go w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, wykorzystywania nieoryginalnych akcesoriów bądź narzędzi itp.,

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.