

# CHODZIK CZTEROKOŁOWY KOMFORT 2W1

PL

## Instrukcja obsługi

### CEL PRODUKTU

To chodzik jest odpowiednie dla osób z problemami ruchowymi. Może być używane również jako pomocniczy środek ułatwiający opiekę ambulatoryjną. Zdecydowanie nie mogą go używać osoby z wyraźnym zaburzeniem ręki i ramienia, a także osoby z zaburzeniami równowagi. Chodzik można używać w pomieszczeniach i na zewnątrz. Zalecamy używanie na płaskiej powierzchni, gdzie wszystkie koła dotykają podłoża. Nie może być używany na kamiennej powierzchni ani na pochylej płaszczyźnie, ponieważ chodzik może stać się niestabilny. Urządzenie nie jest przeznaczone do przewożenia osób ani przedmiotów.

### OSTRZEŻENIE:

- Nie używaj produktu do innych celów niż podane w instrukcji.
- Producent i dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku używania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją obsługi.
- Producent zastrzega sobie prawo do zmian i modyfikacji produktu w celu jego ulepszenia bez wcześniejszego powiadomienia.

### OGÓLNE OSTRZEŻENIA

- Nigdy nie instaluj ani nie używaj urządzenia, zanim nie przeczytasz i nie zrozumiesz tej instrukcji. Jeśli nie udaje Ci się zrozumieć ostrzeżeń, uwag lub zaleceń, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub personelem technicznym przed próbą instalacji tego urządzenia, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia sprzętu. OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA
- Upewnij się, że linka hamulca jest prawidłowo ustawiona;
- Sprawdź prawidłowe działanie hamulca po każdej regulacji wysokości, aby zapobiec zbytniemu poluzowaniu linki;
- Naruszenie tych podstawowych zasad może spowodować obrażenia;
- Chodzik można używać wyłącznie na twardej i równej powierzchni. Nie używaj urządzenia do wchodzenia po schodach;
- Zawsze utrzymuj równowagę na obu uchwytych;
- Zwracaj szczególną uwagę podczas poruszania się po mokrej, oblodzonej lub ośnieżonej powierzchni;
- Nie przeciążaj urządzenia;
- Nie używaj siedziska do przewożenia osób lub majątku, siedzenie jest przeznaczone wyłącznie dla użytkownika i przy aktywnej blokadzie hamulca postojowego;
- Wszystkie koła muszą podczas użytkowania stale stykać się z podłożem, aby zapewnić prawidłowe wyważenie chodzika i maksymalne bezpieczeństwo;
- Przed użyciem siedziska chodzik musi być zahamowany.

Uwaga: Jeśli chodzik jest używany jako podpora w nieruchomej pozycji, hamulec ręczny musi być zablokowany.

### NOŚNOŚĆ:

Chodzik może być używany przez osobę o wadze do 100 kg, WŁĄCZNIE z torbą na przechowywanie.

Maks. nośność torby wynosi 5 kg.

## **OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE MONTAŻU:**

- Upewnij się, że obie rury wspierające uchwyty są prawidłowo wsunięte w ramę i pewnie zamocowane za pomocą kółek zabezpieczających zablokowanych w uchwycie przy pomocy głównych nakrętek motylkowych i pokręteł bez luzu;
- Oba uchwyty są bezpiecznie zamocowane w głównej części podpierającej za pomocą nakrętek motylkowych i śrub;
- Nie zawieszaj niczego na ramie chodzika — grozi to uszkodzeniem. Uszkodzenie ramy może spowodować obrażenia;
- Podczas rozkładania i składania chodzika zachowaj ostrożność i unikaj przycięcia palców i/lub odzieży.

## **OPIS OGÓLNY**

### **PRZED UŻYCIEM**

Zawsze sprawdź:

- Wszystkie części chodzika są bezpiecznie zamocowane;
- Sprawdź, czy wszystkie śruby są dokręcone;
- Upewnij się, że siedzisko jest prawidłowo zabezpieczone;
- Sprawdź, czy siedzisko jest prawidłowo wsunięte;
- Sprawdź prawidłowe działanie obu hamulców;
- Sprawdź zużycie części produktu, aby upewnić się, że produkt będzie całkowicie bezpieczny dla użytkownika i jego otoczenia.

### **PRZED MONTAŻEM**

Rozpakuj produkt i sprawdź, czy nie został uszkodzony podczas transportu. W przypadku uszkodzenia nie używaj produktu i skontaktuj się ze sprzedawcą.

### **MONTAŻ MODELU**

Rozłożenie chodzika

- Rozłóż chodzik, rozsuwając ramę i nogi;
- Wsuń rury uchwytów w ramę.

### **Regulacja uchwytów**

Ustaw wysokość uchwytów za pomocą bocznych pokręteł. Odkręć śrubę, ustaw uchwyty na żądanej wysokości, obracaj pokrętłem zgodnie z ruchem wskazówek zegara i ponownie je dokręć. Powtórz z drugim uchwytem i upewnij się, że oba uchwyty są ustawione na tej samej wysokości. Mogą być instalowane także dodatkowe uchwyty ułatwiające wstawianie z siedziska.

### **OSTRZEŻENIE:**

Upewnij się, że pozycja uchwytów jest zgodna z kierunkiem ruchu chodzika. Jeśli uchwyt nie pozostaje prosty, istnieje ryzyko, że chodzik będzie się trząsł lub przewróci, szczególnie jeśli pchasz go większą siłą.

### **Złożenie chodzika**

Pociągnij za boczne pręty i przysuń przednią część chodzika.

### **Koszyk na zakupy**

Koszyk na zakupy jest przymocowany do ramy chodzika za pomocą dwóch haków.

**OSTRZEŻENIE:** Używaj koszyka tylko na drobne przedmioty. Nie przepełniaj koszyka — grozi to przewróceniem!

## **Siedzenie**

Przed usiądciem ustaw chodzik na równej i twardej powierzchni, a następnie zablokuj hamulce. Upewnij się, że hamulce są pewnie zablokowane, a chodzik znajduje się w stabilnej pozycji.

**OSTRZEŻENIE:** Usiądź tak, aby równomiernie rozłożyć ciężar na siedzisku. Nie siadaj tylko z jednej strony.

## **PRAKTYCZNE UŻYTKOWANIE**

- Zaczynij pchać chodzik, gdy jesteś w pozycji wyprostowanej i z obiema rękami na uchwytach;
- Upewnij się, że Twoje ręce są suche, aby uniknąć ryzyka poślizgnięcia;
- Podczas chodzenia utrzymuj wyprostowaną pozycję z oczami skierowanymi przed siebie, a nie w dół;
- Nie pchaj chodzika zbyt daleko od ciała, co może spowodować upadki i niewłaściwe obciążenie;
- Nie używaj chodzika do pokonywania przeszkód wyższych niż 20 mm;
- Podczas korzystania na zewnątrz wybieraj chodniki.

## **Hamulce**

Jak hamować

Aby zahamować chodzik, pociągnij dźwignię hamulca palcami do góry, aż chodzik zwolni lub się zatrzyma. Aby kontynuować ruch, zwolnij dźwignię hamulca.

Blokada hamulca

Naciśnij dźwignię hamulca dłonią. Gdy usłyszysz „kliknięcie”, koła zostaną zablokowane.

**OSTRZEŻENIE:** Jeśli nie poruszasz się z chodzikiem, zawsze zablokuj koła.

Odblokowanie kół

Pociągnij obie dźwignie hamulca, aż hamulce się zwolnią.

## **KONSERWACJA**

W przypadku naprawy używaj wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów.

Okres żywotności produktu zależy od sposobu użytkowania, konserwacji, przechowywania i czyszczenia.

## **CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA**

Czyszczenie

Podczas czyszczenia części używaj wyłącznie wilgotnej ściereczki z neutralnym środkiem czyszczącym. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użyciem materiałów, które mogłyby uszkodzić powierzchnię produktu lub za środki żrące.

Dezynfekcja

W razie potrzeby zdezynfekuj produkt zwykłym środkiem dezynfekującym. Nie używaj substancji ściernych, kwasów, alkoholu ani środków na bazie chloru, środków dezynfekujących oraz acetonu, które mogłyby spowodować trwałe uszkodzenie powierzchni profilu.

Konserwacja kół

Oczyść koła ciepłą wodą i łagodnym detergentem. Osusz je czystą ściereczką. Regularnie smaruj koła.

## **Dane techniczne**

Ilość kół: 4

Regulowana wysokość rączek: 85-92 cm

Szerokość przy uchwytach: 57 cm

Wymiary złożonego chodzika: 67 x 29 x 101 cm

Wymiary tapicerowanego siedziska: 34 x 38 cm

Hamulce dociskowe: tak

Maks. obciążenie (wliczając nośność torby): 100 kg

Maks. nośność torby: 5 kg

Waga: 5 kg

## **Ochrona środowiska**

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie okresu użytkowania produktu lub gdy jego naprawa jest nieopłacalna, nie wyrzucaj go do odpadów komunalnych. W celu prawidłowej utylizacji oddaj produkt do wyznaczonych punktów zbiórki, gdzie zostanie przyjęty bezpłatnie.

Prawidłowa utylizacja pomaga zachować cenne zasoby naturalne i zapobiega potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby wynikać z niewłaściwej utylizacji odpadów. Dodatkowe informacje uzyskaj w lokalnym urzędzie lub najbliższym punkcie zbiórki. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z krajowymi przepisami.

Baterii nie wyrzucaj do zwykłego odpadu, lecz oddaj je do miejsc zapewniających recykling baterii.

## **Serwis**

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek wady po zakupie skontaktuj się z działem serwisowym. Podczas korzystania z produktu postępuj zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeśli zmodyfikowano produkt lub nie stosowano się do instrukcji obsługi.

## **Gwarancja nie obejmuje:**

- naturalnego zużycia funkcjonalnych części produktu w wyniku jego normalnego użytkowania
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana części podlegających zużyciu)
- usterek spowodowanych czynnikami zewnętrznymi (np. warunkami klimatycznymi, zapyleniem, niewłaściwym użyciem itp.)
- uszkodzeń mechanicznych w wyniku upadku produktu, uderzeń, wstrząsów itp.
- szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania lub używania produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, przeciążenia, użycia niewłaściwych lub nieoryginalnych części, używania niewłaściwych lub nieoryginalnych akcesoriów albo nieodpowiednich narzędzi itp.
- szkód powstałych w wyniku używania nieoryginalnych adapterów lub użycia oryginalnego adaptera z innym produktem. Zawsze konieczne jest zachowanie wzajemnej kompatybilności w ramach jednego produktu.

W przypadku reklamowanych produktów, które nie zostały odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu, ryzyko ewentualnych szkód ponosi wyłącznie właściciel. Dostawca zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za ewentualne błędy drukarskie. Ilustracje i opis mogą różnić się od rzeczywistości w zależności od modelu.