

OSOBISTY WZMACNIACZ DŹWIĘKU DUAL PLUS



Instrukcja obsługi model JH-A39

Szanowny kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzmy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

1. PRZEZNACZENIE

Wzmacniacz dźwięku powinien kompensować problemy ze słuchem.

Efekty uboczne

- użytkownicy, których skóra jest wrażliwa na materiał silikonowy mogą odczuwać swędzenie w kanale słuchowym.

2. WAŻNE ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz wszystkimi innymi dokumentami znajdującymi się w opakowaniu.

3.1 PRZECIWWSKAZANIA

Urządzenie nie jest odpowiednim i nie powinno być używane w następujących sytuacjach:

- Zabrania się używania urządzenia przy przewlekłym ostrym zapaleniu ucha środkowego oraz przy wrodzonych wadach przewodzenia słuchowego;
- Niniejszy wzmacniacz dźwięku powinien być wykorzystywany wyłącznie do kompensacji zaburzeń słuchu a nie do celów terapeutycznych.
- Urządzenia nie mogą używać dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy.

3.2 OSTRZEŻENIA

- Wzmacniacz dźwięku zawiera małe elementy, które mogą być połknięte. Dlatego należy przechowywać go wraz z akcesoriami poza zasięgiem dzieci oraz osób umyślowo upośledzonych. Jeśli doszło do połknięcia jakiegokolwiek elementu, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub udać się do szpitala. Rzucanie, zanurzanie w płynie, silne pola elektromagnetyczne lub nadmierne ciepło mogą spowodować uszkodzenie wzmacniacza dźwięku. Jeśli jakiegokolwiek elementy pozostaną w uchu, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, nie należy próbować samemu ich wyjmować.

3.3 UWAGI

- Nie wolno używać przy dużej głośności przez dłuższy okres. W innym przypadku może dojść do pogłębienia się uszkodzenia słuchu. Jeśli odczuwamy dyskomfort w uchu, należy na chwilę wyjąć z niego wzmacniacz dźwięku.

- Urządzenie należy przez cały czas utrzymywać w czystości, unikać tego, żeby wkładka uszna i otwór mikrofonu były zakrywane przez obce przedmioty. Zakłóci to sprawność wzmacniacza dźwięku.

- Należy chronić urządzenie przed upadkiem i wstrząsami. Nie należy go przechowywać ani używać w środowisku z wysoką temperaturą, takim, jak np. sauna.

- Nie wolno używać wzmacniacza dźwięku w potencjalnie wybuchowym lub niebezpiecznym środowisku.

- Urządzenie należy trzymać poza zasięgiem dzieci. Mogłyby go uszkodzić lub roztrzaskać.

- Nie należy używać w agresywnym środowisku skutkującym nadmierną oksydacją, w takich okolicznościach należy ograniczyć czas używania do minimum.

- Nie wolno ustawiać zbyt wysokiego poziomu głośności. Długie używanie przy wysokiej głośności może spowodować uszkodzenie słuchu. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, że wzmacniacz posiada znaczną moc dźwięku.

- Nie wolno pozyczać urządzenia innym osobom. Używanie wzmacniacza dźwięku przez inną osobę może spowodować uszkodzenie słuchu.

- Należy monitorować wszystkie nietypowe reakcje skórne. W niektórych przypadkach noszenie wzmacniacza dźwięku może powodować reakcję alergiczną prowadzącą do swędzenia lub wysypki.

Jeśli zauważymy nienaturalny stan skóry, należy natychmiast zaprzestać używania wzmacniacza dźwięku i skontaktować się z lekarzem.

- Nie wolno dotykać wzmacniacza dźwięku namagnesowanymi przedmiotami. Urządzenie może się uszkodzić, jeśli dojdzie do kontaktu z namagnesowanym przedmiotem.

- Należy pamiętać o tym, żeby wyjąć wzmacniacz dźwięku z ucha podczas diagnostyki lub leczenia (jeśli wzmacniacz dźwięku jest w użyciu, może dojść do jego uszkodzenia i stanie się bezużyteczny).

- Nie wolno dotykać wnętrza wzmacniacza dźwięku. Znajduje się tam dużo delikatnych elementów, które są dokładnie skalibrowane. Nie wolno wkładać do wnętrza urządzenia igieł lub innych podobnych przedmiotów.

- Nie wolno stawiać go na gorących lub wilgotnych powierzchniach. Pod żadnym pozorem nie wolno pozostawiać wzmacniacza dźwięku w pobliżu elementów grzejnych lub w bezpośrednim słońcu, należy unikać wilgotnych miejsc takich, jak np. łazienki lub sąsiedztwo nawilżacza powietrza.


- W zamkniętym pojeździe w lecie może panować bardzo wysoka temperatura.

Dlatego nie należy pozostawiać w nim wzmacniacza dźwięku.

- Fale radiowe z telefonów komórkowych mogą wywoływać zakłócenia w urządzeniu lub doprowadzić do obniżenia się głośności.

- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów związanych z wzmacniaczem dźwięku, należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym.

4. ODKRYJ SWOJE URZĄDZENIE

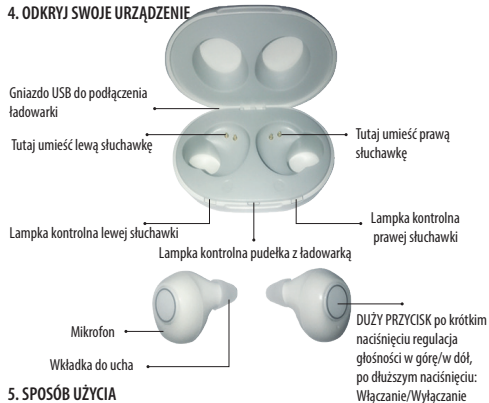


5. SPOSÓB UŻYCIA

Włączanie i wyłączanie

1. Włączanie: Naciśnij **DUŻY PRZYCIŚK** i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż usłyszysz dwukrotne „piknięcie”.
2. Wyłączanie: Naciśnij **DUŻY PRZYCIŚK** i przytrzymaj przez 3 sekundy, aż usłyszysz dwukrotne „piknięcie” i dźwięki ucichną.


Regulacja głośności – 6 poziomów

Naciskaj **DUŻY PRZYCIŚK**, po każdym „piknięciu” poziom głośności rośnie. Pojawienie się trzykrotnego „piknięcia” oznacza osiągnięcie głośności maksymalnej. Kolejne naciśnięcie przycisku spowoduje przejście do najniższego poziomu.

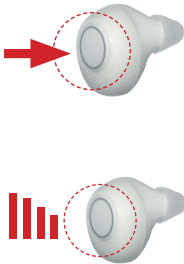

Ładowanie wzmacniacza dźwięku

Przed rozpoczęciem ładowania wyłącz wzmacniacz dźwięku i upewnij się, że faktycznie nie działa. Następnie umieść słuchawki w pudełku z ładowarką. Podczas ładowania lampka kontrolna pali się na **NIEBIESKO**, po naładowaniu się urządzenia zmieni kolor na **BIAŁY**.

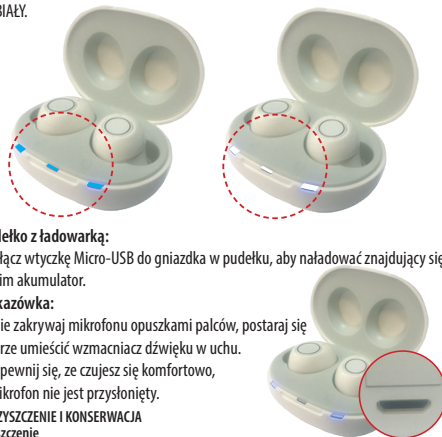

Pudełko z ładowarką:

Podłącz wtyczkę Micro-USB do gniazdka w pudełku, aby naładować znajdujący się w nim akumulator.

Wskazówka:

1. Nie zakrywaj mikrofonu opuszkami palców, postaraj się dobrze umieścić wzmacniacz dźwięku w uchu.
2. Upewnij się, że czujesz się komfortowo, a mikrofon nie jest przysłonięty.

6. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyszczenie

Czyść codziennie wzmacniacz dźwięku ze względów higienicznych oraz dla zachowania jego funkcjonalności. Czyść urządzenie miękką, suchą szmatką. Otwory we wkładkach dousznych czyść regularnie szczoteczką i patyczkiem dostarczonymi z urządzeniem. Podczas czyszczenia końcówki powinny być zdjęte z urządzenia. **UWAGA:** Nie wolno zanurzać wzmacniacza dźwięku w wodzie. Nie wolno wstawiać urządzenia oraz akcesoriów do wody.

Przechowywanie

Jeśli wzmacniacz dźwięku nie będzie używany przez dłuższy okres, należy przechowywać go w suchym otoczeniu, aby nie dopuścić do wnikiwilności wilgoci do jego wnętrza. Przed odłożeniem na miejsce przechowywania należy załadować baterie w słuchawkach i pudełku. Dłuższe przechowywanie w stanie rozładowania może doprowadzić do ich uszkodzenia.

7. DANE TECHNICZNE

Maksymalne OSPL90:	117 dB +/- 3 dB
Moc średnia:	29 +/- 3 dB
Równoważny poziom szumów wejściowych:	≤ 32 dB
Całkowite zniekształcenia harmoniczne:	≤ 7%
Zakres odbieranych częstotliwości:	400 Hz x 4500 Hz
Znamionowy pobór prądu ładowarki:	≤ 6 mA
Czas pracy po naładowaniu:	10 - 12 godzin
Czas ładowania słuchawek:	90 min - 120 min
Stacja ładująca z prądem funkcjonalnym:	≤ 70 mA
Napięcie robocze ładowarki:	3.7V
Czas ładowania akumulatora w pudełku:	90 min
Prąd ładowania wzmacniacza dźwięku:	≤ 30 mA
Napięcie ładowania wzmacniacza dźwięku:	4.2 V

OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO

Informacje dotyczące utylizacji urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Po upływie czasu żywotności urządzenia lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, urządzenia nie wyrzucaj do domowych odpadów. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wolno wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi.

Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
 - czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
 - usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapalenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
 - uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
 - szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.
- Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.