


APARAT SŁUCHOWY

Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie.

Części składowe

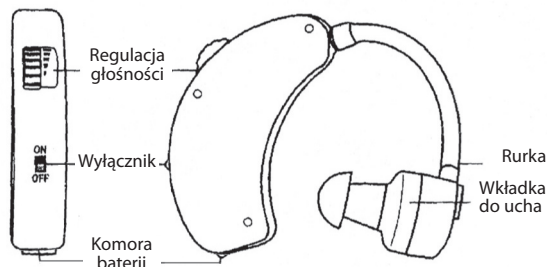

Sposób użycia

- Ustaw głośność na najniższy poziom.
- Sprawdź, czy bateria jest prawidłowo zamontowana.
- Załóż aparat na prawe lub lewe ucho.

UWAGA

Wybierz z 3 dostarczonych wkładek tą, która najlepiej pasuje do Twojego ucha tak, aby kanał słuchowy był dobrze uszczelniony. Jeżeli wkładka nie uszczelni przewodu słuchowego, mogą pojawić się interferencje dźwięku, które wytwarzają nieprzyjemne piski w słuchawce. Wyłącznik przełącz w pozycję ON (załączone). Ustaw głośność na pożądanym poziomie.

Ostrzeżenie!

Nie wolno zakrywać aparatu (dłonią itp.), mogą wtedy pojawiać się głośne piski w słuchawce.

Wyłącznik ON/OFF

ON



OFF

Wyłącznik może znajdować się w jednej z dwóch pozycji:

ON = załączone,

OFF = wyłączzone.


Należy zawsze wyłączać aparat (pozycja OFF), gdy jest on nieużywany.

Takie postępowanie wydłuża żywotność baterii.


Regulacja głośności

Urządzenie posiada płynną regulację głośności.

Poziom głośności ustawia się przy pomocy pokrętła.

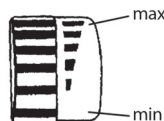


Wymiana baterii

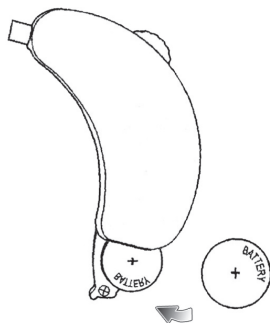

Otwórz komorę baterii i włóż do niej baterię (tak, jak to pokazano na rysunku). Należy użyć baterii guzikowej 1,5V typu LR-44. Zwróć uwagę na prawidłową polaryzację (zob. rysunek).

Zakładanie aparatu

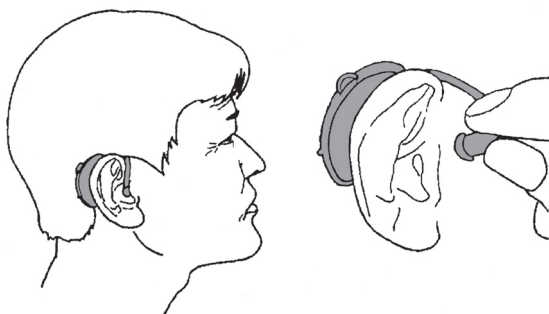

Wsuń wkładkę do kanału słuchowego. Upewnij się, że wkładka jest prawidłowo połączona z rurką urządzenia.

Ostrzeżenia

- Głośność należy zwiększać powoli, aby nie doszło do nagłego zwiększenia poziomu dźwięków pochodzących z otoczenia, co może wywołać ból ucha.
- Produkt ten NIE JEST środkiem medycznym przeznaczonym do kompensacji przytępienia słuchu. Możliwość korzystania z urządzenia skonsultuj z lekarzem specjalistą.
- Zawsze trzymaj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Baterii nie wolno ładować.
- Nie wolno wrzucać baterii do ognia.
- Baterie trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Jeżeli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterię.
- Nie należy wyrzucać zużytych baterii do odpadów domowych, należy je oddać w miejsce zapewniające odpowiedni ich recykling.
- Urządzenie nie jest wodoodporne, nie można dopuścić do jego kontaktu z wodą.
- Jeżeli przypadkowo dojdzie do zamoczenia, wyłącz urządzenie, wyjmij z niego baterię i dokładnie wysusz.

Dane techniczne

Żywotność baterii – do 24 godzin
(1 szt. LR-44)

Prąd znamionowy – <8,4mA

Przedział napięcia pracy - 1,0-1,6V

Waga (łącznie z baterią) – 10g

Zakres częstotliwości - 100~12kHz+/-6dB

SSPL 90dB - 130dB

Zniekształcenia harmoniczne - <5,3%