

Pompka próżniowa ErectoMax


PL

Instrukcja obsługi

Szanowny Kliencie, dziękujemy za okazanie zaufania i wybór tego produktu. Wierzymy, że będą Państwo z niego w pełni zadowoleni. W instrukcji obsługi opisano zasady efektywnego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

Wykaz elementów

- a) Wążek pompki
- b) Tubus próżniowy
- c) Podziałka (do mierzenia)
- d) Zaworek do redukcji podciśnienia
- e) Pompka próżniowa (gruszka)
- f) Silikonowy pierścień uszczelniający

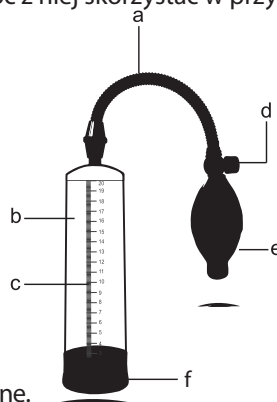



Funkcje:

Wspomaga wzwód penisa

Sposób użycia:

1. Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo połączone.
2. Nałóż odrobinę lubrykantu wokół pierścienia silikonowego, aby zmniejszyć tarcie.
3. Ostrożnie wsuń penisa do otworu w pierścieniu, upewniając się, że uszczelka szczelnie do niego przylega.
4. Zgniataj gruszkę pompki próżniowej do momentu, aż poczujesz komfortowy ucisk.
5. Jeśli poczujesz ból, naciśnij zawór redukujący podciśnienie.

Obrazkowy przewodnik

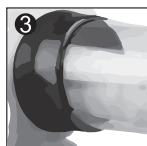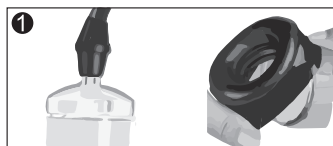


Wskazówki

- Przed użyciem należy umyć pierścień uszczelniający i pojemnik próżniowy mydłem antybakteryjnym i ciepłą wodą.
 - Jako lubrykantów nie należy stosować olejków do masażu, kremów do rąk, środków czyszczących. Należy zawsze używać odpowiedniego żelu nawilżającego na bazie wody.
 - Należy zawsze dobierać odpowiedni poziom podciśnienia, aby uniknąć obrażeń penisa.
- Pompki należy używać zawsze zgodnie z instrukcją obsługi. Nie wolno z nią eksperymentować.**

Czyszczenie

- Wszystkie elementy urządzenia należy natychmiast po użyciu wyczyścić używając ciepłej wody i mydła antybakteryjnego, aby zapobiec rozwojowi bakterii.
- Należy zawsze wysuszyć je w sposób naturalny i unikać ich bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym.
- Przechowywać w suchym, chłodnym i nie narażonym na kurz miejscu.
- Należy zadbać o to, żeby pompka nie styka się z niczym, co mogłoby ją zanieczyścić.
- Urządzenie należy przechowywać w miejscu poza zasięgiem dzieci.

Zasada działania:

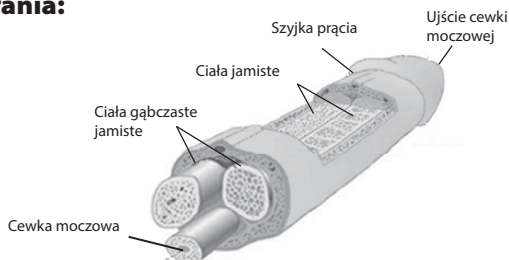

Urządzenie jest wydrążonym cylindrem z mechanizmem odsysającym. Wkłada się do niego penisa i ostrożnie odsysa powietrze. Powstałe w ten sposób podciśnienie rozszerza naczynia krwionośne penisa, przez które krew jest pompowana do ciała jamistego. W ten sposób penis może osiągnąć stosunkowo niezawodną erekcję. Pompka próżniowa wspomagająca erekcję jest urządzeniem mechanicznym. Jest prosta w użyciu, ale jeśli wytworzy się zbyt duże podciśnienie i zbyt długo jest założona na penisie, istnieje ryzyko zranienia jego ciał jamistych lub uszkodzenia skóry.

Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie. Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

Serwis

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli dokonano zmian w konstrukcji lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku. Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu. Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.