

Dziękujemy za okazanie zaufania i wybór jednego z naszych produktów. Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji obsługi opisują zasady prawidłowego użytkowania produktu. Instrukcję należy zachować, aby móc z niej skorzystać w dowolnym momencie. Produkty te wykorzystują lecznicze działanie magnesów. Ważną ich zaletą jest uniwersalny rozmiar. Niniejsza instrukcja obsługi obowiązuje dla wszystkich oferowanych przez naszą firmę opasek i pasów magnetycznych.

## Informacje dla użytkownika

### a) Opaska na kolano

#### Właściwości:

- 8 wszytych magnesów,
- poprawia krążenie krwi,
- wspomaga rehabilitację po złamaniach i naciągnięciach więzadeł,
- elastyczny materiał.

**Sposób użycia – zob. poniżej.**



### b) Pas lędźwiowy

#### Właściwości:

- 16 wszytych magnesów,
- poprawia krążenie krwi, rozgrzewa obszar lędźwiowy kręgosłupa,
- ma korzystny wpływ na dolną część pleców,
- łagodzi ból pleców.

**Sposób użycia – zob. poniżej.**



### c) Opaska na szyję

#### Właściwości:

- 9 wszytych magnesów,
- rozgrzewa okolice szyi, stymuluje mięśnie w części szyjnej kręgosłupa,
- łagodzi ból i zesztywnienie,
- rozgrzewa okolice szyi.

**Sposób użycia – zob. poniżej.**



### d) Opaska magnetyczna na nadgarstek

#### Właściwości:

- 4 wszyte magnesy,
- doskonale sprawdza się przy problemach związanych z zapaleniem stawów, łagodzi ból związany z długotrwałym posługiwaniem się klawiaturą komputerową,
- poprawia krążenie krwi, zmniejsza napięcie w obszarze nadgarstka,
- uniwersalna, może być zakładana zarówno na prawą, jak i lewą rękę.

**Sposób użycia – zob. poniżej.**



### e) Opaska magnetyczna na łokieć

#### Właściwości:

- 12 wszytych magnesów,
- łagodzi dyskomfort po urazach bądź naciągnięciach mięśni i stawów,
- poprawia krążenie krwi, zmniejsza napięcie w okolicach łokcia,
- daje efekt kompresu i działa rozgrzewająco.

**Sposób użycia – zob. poniżej.**



### f) opaska magnetyczna na kostkę

#### Właściwości:

- 8 wszytych magnesów,
- ma zastosowanie w przypadku łagodnego bólu kostki, łagodnego bądź umiarkowanego skrócenia stawu, a także w przypadku jego niestabilności,
- doskonale sprawdza się w trakcie rehabilitacji pooperacyjnej, nadaje się również do korygowania odkształceń,
- daje efekt kompresu i działa rozgrzewająco.

**Sposób użycia – zob. poniżej.**



# g) Magnetyczny stabilizator kręgosłupa

## Właściwości:

- 12 wszytych magnesów,
- pomagają korygować wady postawy,
- łagodzą ból związany z nieprawidłowym ukształtowaniem kręgosłupa,
- magnesy stymulują punkty akupresury znajdujące się na plecach,
- poprawia krążenie krwi.

**Sposób użycia – zob. z prawej.**



## Czyszczenie

Należy czyścić wilgotną szmatką.



Prać ręcznie



Nie wolno  
czyścić  
chlorem  
(chlorować)



Nie wolno  
prasować



Nie wolno  
czyścić  
chemicznie



Nie wolno suszyć w  
suszarce bębnowej

**OSTRZEŻENIE:** Produkt zawiera magnesy, które nie powinny być używane przez osoby posiadające wszczepiony stymulator bądź rozrusznik serca, korzystające z pompy insulinowej oraz kobiety w ciąży. Nie wolno zakładać na rany otwarte.

**UWAGA:** Produkty są wyposażone w magnesy. Należy unikać kontaktu z komputerem, twardymi dyskami, kasetami magnetycznymi audio i wideo lub innymi tego typu sprzętami.

## Ochrona środowiska naturalnego

Po upływie okresu żywotności produktu lub w momencie, kiedy naprawa jest nieekonomiczna, nie wolno wyrzucać go do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać go w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęty nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

## Serwis:

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą. Używając produktu należy przestrzegać zasad zawartych w załączonej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

## Gwarancja nie obejmuje:

- naturalnego zużycia elementów ruchomych produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem, używania nieodpowiednich akcesoriów bądź narzędzi itp.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.