

# REGULOWANY SCHODEK POMOCNICZY TELESKOPOWY



**Model: BG-T-2010**

## **Instrukcja obsługi**

Szanowny Kliencie, dziękujemy za zaufanie, jakim obdarzyłeś nas, kupując ten produkt. Wierzymy, że będziesz z niego w pełni zadowolony. Niniejsza instrukcja służy do prawidłowego użytkowania produktu. Zachowaj ją na przyszłość. Pomocniczy podest ułatwia wchodzenie do wanny, może być używany przez dzieci, aby łatwiej sięgały do umywalki itp. Jest wyposażony w higieniczną, antypoślizgową powierzchnię do stania z zaokrąglonymi krawędziami oraz gumowe końcówki nóg zapobiegające ślizganiu.

### **Ważne wskazówki**

Konieczne zachowaj te wskazówki do późniejszego wykorzystania! Przed pierwszym użyciem zakupionego produktu dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi, zwłaszcza zalecenia dotyczące bezpieczeństwa. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeśli przekazesz produkt osobie trzeciej, dołącz do niego również instrukcję obsługi.

Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla tego produktu i zawiera ważne informacje dotyczące jego montażu i użytkowania. Przeczytaj całą instrukcję.

Nieprzestrzeżenie zaleceń zawartych w instrukcji może prowadzić do poważnych obrażeń lub uszkodzenia produktu.

### **Ważne**

- Maksymalne obciążenie podestu wynosi 100 kg! Produkt nie może być używany jednocześnie przez więcej niż jedną osobę.
- Wysokość podestu jest regulowana na trzech poziomach od 21 cm do 26 cm. Przed użyciem upewnij się, że wszystkie cztery bolce blokujące są zatrzaśnięte.
- Używaj podestu zgodnie z jego przeznaczeniem i przestrzegaj zaleceń zawartych w tej instrukcji.
- Nie dokonuj żadnych zmian w konstrukcji i nie używaj produktu razem z innymi meblami lub częściami innych urządzeń.
- Nie mocuj żadnych dodatkowych elementów.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku prywatnego w gospodarstwie domowym. Nie nadaje się do użytku komercyjnego (np. w szpitalach, domach opieki itp.).
- Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony, oraz skontroluj prawidłowe zamocowanie skręconych części. W przypadku wątpliwości nie używaj produktu – grozi to niebezpieczeństwem wypadku.
- Nie przeprowadzaj samodzielnych napraw – w przeciwnym razie utracisz prawo do gwarancji.
- W celu naprawy skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Jeśli produkt jest używany przez dzieci lub w ich pobliżu, albo przez osoby z ograniczoną sprawnością, konieczna jest obecność osoby nadzorującej (lub osoby pomagającej).
- Produkt nie jest zabawką.
- Upewnij się, że podest jest zawsze ustawiony na stabilnym podłożu.
- Nie zostawiaj materiałów opakowaniowych w pobliżu dzieci – istnieje ryzyko uduszenia!

## **Zawartość dostawy i opakowanie**

Najpierw proszę sprawdzić, czy zawartość dostawy jest kompletna i czy dostarczony towar nie ma wad. W przypadku wątpliwości nie używaj produktu i skontaktuj się z serwisem. W skład opakowania wchodzi: powierzchnia do stania, 2 nogi, woreczek ze śrubami montażowymi i instrukcja obsługi. Jeśli podczas rozpakowywania produktu stwierdzisz uszkodzenie powstałe w transporcie, natychmiast skontaktuj się ze sprzedawcą.

## **Instrukcja montażu podestu**

Obie nogi przykręć do powierzchni do stania za pomocą śrub montażowych dołączonych do opakowania. Do zamocowania każdej nogi służy jedna śruba i dwa wkręty. Śruby dokręć za pomocą klucza imbusowego. Otwory na wkręty nie są wstępnie nawiercone – do ich montażu użyj śrubokręta i na początku montażu lekko dociśnij śrubokręt. Śruby i wkręty dokręć wystarczająco mocno, ale z wyczuciem, aby nie uszkodzić gwintu.

## **Ostrzeżenie**

Przed użyciem sprawdź, czy produkt nie jest uszkodzony i skontroluj poprawność mocowania skręconych części. W razie wątpliwości nie używaj produktu – istnieje ryzyko upadku!

## **Konserwacja**

Do czyszczenia nie używaj żrących środków czyszczących – zanieczyszczenia i kurz usuwaj miękką lub lekko wilgotną szmatką. W przypadku silnych zabrudzeń użyj zwykłego neutralnego środka czyszczącego. Po oczyszczeniu wilgotną szmatką i po każdym użyciu podest dokładnie osusz.

## **Dane techniczne**

Rozmiar powierzchni do stania: 40 x 23 cm

Wysokość podestu: 21 do 26 cm

Maksymalne obciążenie: 100 kg

### **Ochrona środowiska naturalnego:**

Po upływie okresu przydatności do użycia nie wolno wyrzucać produktu do odpadów domowych. Aby dokonać właściwej utylizacji produktu, należy oddać je w wyznaczonym miejscu zbiórki, gdzie zostanie przyjęte nieodpłatnie.

Dokonując prawidłowej utylizacji pomagasz zachować cenne zasoby przyrodnicze i wspomagasz prewencję przeciw potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie, na co mogłaby mieć wpływ nieprawidłowa utylizacja odpadów. Dalszych szczegółów wymagaj od lokalnego urzędu lub w najbliższym miejscu zbiórki odpadów. W przypadku nieprawidłowej likwidacji tego rodzaju odpadów może zostać nałożona kara zgodnie z przepisami krajowymi.

### **Serwis:**

Jeżeli po zakupieniu produktu stwierdzisz, że jest on uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Podczas użytkowania produktu należy przestrzegać zasad zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Reklamacja nie będzie uznana, jeżeli wprowadzono zmiany w produkcie lub nie stosowano się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.

### **Gwarancja nie obejmuje:**

- naturalnego zużycia elementów pracujących produktu w trakcie jego normalnego użytkowania,
- czynności serwisowych związanych ze standardową konserwacją produktu (np. czyszczenie, wymiana elementów zużywających się podczas normalnego użytkowania itd.),
- usterek spowodowanych wpływem warunków zewnętrznych (np. warunki atmosferyczne, zapylenie, nieodpowiednie użytkowanie itp.),
- uszkodzeń mechanicznych powstałych w związku z upadkiem produktu, uderzenia nim itp.,
- szkód powstałych w wyniku nieodpowiedniego obchodzenia się z produktem.

Za uszkodzenia mechaniczne reklamowanego produktu powstałe w wyniku nieprawidłowo zabezpieczenia transportowanego przedmiotu odpowiada jego właściciel.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania ewentualnych zmian w instrukcji obsługi i nie odpowiada za błędy powstałe w druku.

Ilustracje i opisy mogą odbiegać od rzeczywistości w zależności od modelu produktu.