

## Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w celu jej późniejszego wykorzystania.

### Przeznaczenie produktu

Podpórka do wstawania ułatwi, zwłaszcza osobom starszym i mającym problemy z poruszaniem się, wstawanie z WC, łóżka, krzesła, itp.

Przed przystąpieniem do montażu wyciągnij poszczególne elementy z opakowania.

### Opakowanie zawiera:

2szt zwisające konstrukcje z uchwytami

2szt łączące konstrukcje (wygięte rurki)

8szt długich śrub z nakrętkami

### Montaż

1) Przy użyciu długich śrub połącz konstrukcje łączące z konstrukcjami wiszącymi.

Patrz rysunek:

- jedna rurka łącząca łączy dolne elementy konstrukcji wiszących

- jedna rurka łącząca łączy boczne elementy konstrukcji wiszących.

2) Sprawdź dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek, żeby nie doszło do wypadku.

### Sposób korzystania z podpory

Osoba opiera się rękami o poręczę i podciąga się ku górze.

### Czyszczenie i konserwacja

Metalowe rurki przetrzyj zwilżoną ściereczką i wytrzyj do sucha.

Uchwytów piankowych nie należy moczyć.

### Ostrzeżenie

Niniejszy produkt nie jest urządzeniem medycznym.

Regularnie sprawdzaj stan dokręcenia wszystkich śrub i nakrętek.

Obciążenie maksymalne: do 100kg.

Dystrybutor: TV PRODUCTS Sp. z o. o.

Importer do UE: TV PRODUCTS CZ s. r. o.

Kraj pochodzenia: Chiny

## Instrukcja obsługi

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję obsługi należy przechowywać w celu jej późniejszego wykorzystania.

### Przeznaczenie produktu

Podpórka do wstawania ułatwi, zwłaszcza osobom starszym i mającym problemy z poruszaniem się, wstawanie z WC, łóżka, krzesła, itp.

Przed przystąpieniem do montażu wyciągnij poszczególne elementy z opakowania.

### Opakowanie zawiera:

2szt zwisające konstrukcje z uchwytami

2szt łączące konstrukcje (wygięte rurki)

8szt długich śrub z nakrętkami

### Montaż

1) Przy użyciu długich śrub połącz konstrukcje łączące z konstrukcjami wiszącymi.

Patrz rysunek:

- jedna rurka łącząca łączy dolne elementy konstrukcji wiszących

- jedna rurka łącząca łączy boczne elementy konstrukcji wiszących.

2) Sprawdź dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek, żeby nie doszło do wypadku.

### Sposób korzystania z podpory

Osoba opiera się rękami o poręczę i podciąga się ku górze.

### Czyszczenie i konserwacja

Metalowe rurki przetrzyj zwilżoną ściereczką i wytrzyj do sucha.

Uchwytów piankowych nie należy moczyć.

### Ostrzeżenie

Niniejszy produkt nie jest urządzeniem medycznym.

Regularnie sprawdzaj stan dokręcenia wszystkich śrub i nakrętek.

Obciążenie maksymalne: do 100kg.

Dystrybutor: TV PRODUCTS Sp. z o. o.

Importer do UE: TV PRODUCTS CZ s. r. o.

Kraj pochodzenia: Chiny