

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
BALKONIK RF-131**


UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z balkonika należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Balkonik przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu lub z problemem pionizacji. Może być użytkowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Pomaga w codziennych czynnościach, np. wstawaniu z łóżka, chodzeniu, korzystaniu z toalety, spacerze.



MODEL	RF-131/S	RF-131/BR
Nr katalogowy	RF-131	RF-131
Wysokość	77-95 cm / 79-97 cm	77-95 cm / 79-97 cm
Całkowita szerokość (bez kół / z kołami)	57 cm / 60 cm	57 cm / 60 cm
Całkowita długość (bez kół / z kołami)	46 cm / 49 cm	46 cm / 49 cm
Średnica przednich kół (bez kół / z kołami)	Nie dotyczy / 5 cal	Nie dotyczy / 5 cal
Max. bezpieczne obciążenie (bez kół / z kołami)	100 kg / 100 kg	100 kg / 100 kg
Waga (bez kół / z kołami)	2,4 kg / 2,75 kg	2,4 kg / 2,75 kg

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

- Przed użyciem balkonika każdorazowo sprawdź czy:
 - balkonik ustawiony jest na prawidłową wysokość;
 - mechanizm blokujący i przyciski do regulacji wysokości są prawidłowo zabezpieczone;
 - wszystkie stopki balkonika są ustawione na taką samą wysokość;
 - nasadki na stopkach nie są zużyte – jeżeli tak to wymień je.
- Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia balkonika.
- Podczas korzystania z balkonika zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
- Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie balkonika w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
- Nie przechować balkonika w temperaturze poniżej 0°C.
- Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpiecznego użytkowania może doprowadzić do poważnych wypadków.



UWAGA! Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu wyboru odpowiedniego balkonika i akcesoriów oraz sposobu korzystania, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.



UWAGA! Poniższe zalecenie to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.




UWAGA! Jeżeli balkonik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi. Wówczas podczas chodzenia ciężar ciała przejmuje rama balkonika.

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE BALKONIKA

Aby rozłożyć:

1. Postaw balkonik przed sobą opierając go na przednich stopkach.
2. Odchyl obie boczne ramy balkonika do momentu zablokowania się przycisku C-clip na środku ramy poprzecznej (rys. 1).

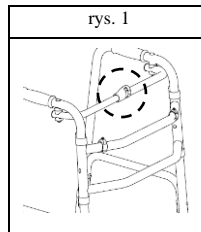

Aby złożyć:

1. Wciśnij przycisk znajdujący się pośrodku ramy poprzecznej (rys. 1). Spowoduje to zwolnienie blokady.
2. Trzymając wciśnięty przycisk złóż obie ramy boczne do środka.

FUNKCJONOWANIE

Balkonik pomaga w utrzymaniu stabilności podczas poruszania się i pozwala na stałą podporę użytkownikowi. Dzięki nowatorskim rozwiązaniom może pełnić funkcję balkonika: kroczącego, przestawnego lub z przednimi kołami.

USTAWIENIE ODPOWIEDNIEJ FUNKCJI

KROCZĄCA

Aby ustawić balkonik na funkcję kroczącą ustaw przycisk blokujący na górnym otworze na ramie bocznej (rys. 2).

PRZESTAWNA

Aby ustawić balkonik na funkcję przestawną ustaw przycisk blokujący na dolnym otworze na ramie bocznej (rys. 3).


MOBILNA

Aby ustawić balkonik na funkcję mobilną, załóż kółka w miejsce przednich stopek (rys. 4):


- a) Naciśnij przycisk zabezpieczający c-clip, obróć delikatnie stopkę i ściągnij ją z ramy balkonika.
- b) Wciśnij przycisk zabezpieczający na stopce z kółkiem, nasuń stopkę na ramę balkonika. tak aby przycisk blokujący wskoczył w otwór.
- c) Wyreguluj odpowiednią dla Ciebie wysokość (patrz regulacja wysokości).

REGULACJA WYSOKOŚCI

1. Wciśnij przycisk zabezpieczający (rys. 5) na stopce i obróć ją delikatnie.
2. Wyreguluj stopkę na odpowiednią wysokość.
3. Naceluj przyciskiem na odpowiedni otwór dzięki czemu zablokujesz stopkę na żądanej wysokości.
4. Powtórz powyższe czynności na każdej stopce upewniając się, że wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.

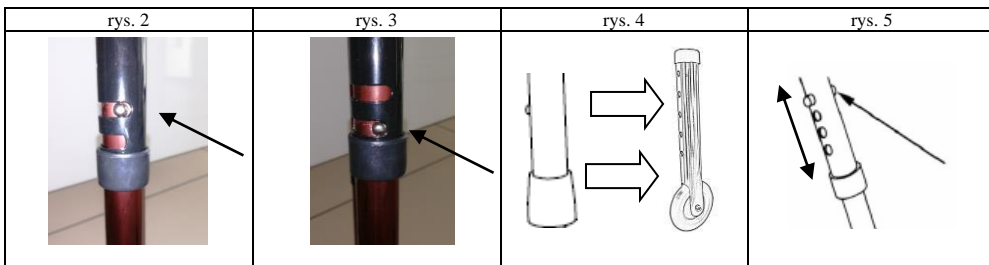

CZĘŚCI BALKONIKA

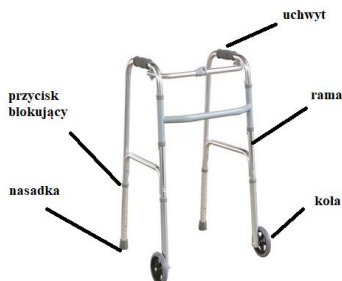

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę balkonika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
 - przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość;
 - otwory w rurkach nie są powiększone lub wydłużone,
 - dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić;
 - żadne inne części balkonika nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie balkonika miękką szmatką i wodą z mydłem. Balkonik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.



UWAGA! Do czyszczenia balkonika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.



UWAGA! W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zgodności sprzętu do użycia skontaktuj się z serwisem producenta.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Uchwyt	pianka
Koła	PVC (polichlorek winylu)
Nasadka	TPR (guma termoplastyczna)
Przycisk blokujący	stal

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie



REHA FUND Sp. z o.o.
ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.2
Wydano: 02/2021

**KARTA GWARANCYJNA
BALKONIK RF-131**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęćka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Balkonik jest objęty 12 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH *(wypełnia serwis)*

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					