

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KRZESŁO DO HIGIENY OSOBISTEJ OLIWIER 810 WYROB MEDYCZNY

Nr katalogowy:	RF-810
Całkowita szerokość:	48,5 cm
Szerokość siedziska:	48,5 cm
Całkowita wysokość:	72,5 - 82,5 cm
Całkowita długość:	47 cm
Wysokość siedziska:	39 - 49 cm
Głębokość siedziska:	39 cm
Wysokość oparcia:	36 cm
Max. bezpieczne obciążenie:	110 kg
Waga:	2,6 kg



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z krzesła, należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Krzesło pozwala osobom z ograniczoną sprawnością ruchową, osobom po operacjach, seniorom utrzymać codzienną higienę osobistą zachowując przy tym znaczną samodzielność. Specjalne wycięcie umożliwia również dbanie o higienę miejsc intymnych. Dzięki temu sprzętowi zagrożenie upadkiem czy innym urazem, które możliwe są pod prysznicem, znacznie spada.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:


1. Przed korzystaniem z krzesła upewnić się, że:
 - a. wysokość siedziska jest odpowiednio wyregulowana;
 - b. przyciski blokujące działają poprawnie;
 - c. gumowe nasadki są w dobrym stanie;
 - d. wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.
2. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie krzesła w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
3. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia krzesła.
4. Nie przechować w temperaturze poniżej 0°C.
5. Przed użyciem upewnić się, że rurki stóp ustawione są na tej samej wysokości.
6. Nie próbuj przesuwając krzesła w górę lub w dół po pochyłości za pomocą wody, lodu lub oleju.
7. Krzesło musi być stosowane na płaskiej powierzchni.
8. Przed każdym użyciem sprawdź stabilność krzesła oraz poziom dokręcenia śrub.
9. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

REGULACJA WYSOKOŚCI

1. Wciśnij przycisk zabezpieczający na stopce krzesła i obróć go delikatnie.
2. Ustaw odpowiednią wysokość.
3. Naceluj przyciskiem na odpowiedni otwór, dzięki czemu zablokujesz stopkę na żądanej wysokości.
4. Powtórz powyższe czynności na każdej stopce upewniając się, że wszystkie stopki ustawione są na tej samej wysokości.

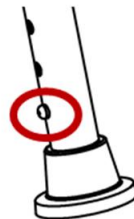

UWAGA! Upewnij się, że wszystkie stopki są poprawnie zablokowane i wyregulowane na tą samą wysokość.


SIADANIE I WSTAWANIE

1. Upewnij się, że krzesło stoi stabilnie i jest gotowy do użycia.
2. Stań tyłem do krzesła tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.

3. Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na siedzisku.
4. Powoli siadaj na krzesle, zginając łokcie i jeśli jest to możliwe kolana oraz biodra.
5. Aby wstać z krzesła, oprzyj dłonie na siedzisku i podnieś się.

MONTAŻ

1. Przygotuj zestaw montażowy (rys. 1).
2. Skrzyżuj nogi krzeselka (rys. 2).
3. Dopasuj je do siedziska od spodu (rys. 3).
4. Wkręć śrubę wraz z podkładką na środku siedziska. Nie dokręcaj jednak śruby do końca (rys. 4).
5. Zamontuj oparcia za pomocą śrub wraz z podkładkami. Nie dokręcaj jednak śrub do końca (rys. 5).
6. Zamontuj opacie za pomocą śrub wraz z podkładkami. Nie dokręcaj jednak śrub do końca (rys. 6).
7. Teraz dokręć wszystkie śruby - wkręcaj po kolei każdą śrubę po trochu. Jeśli dokręcisz śruby wcześniej, możesz mieć problemy z montażem.

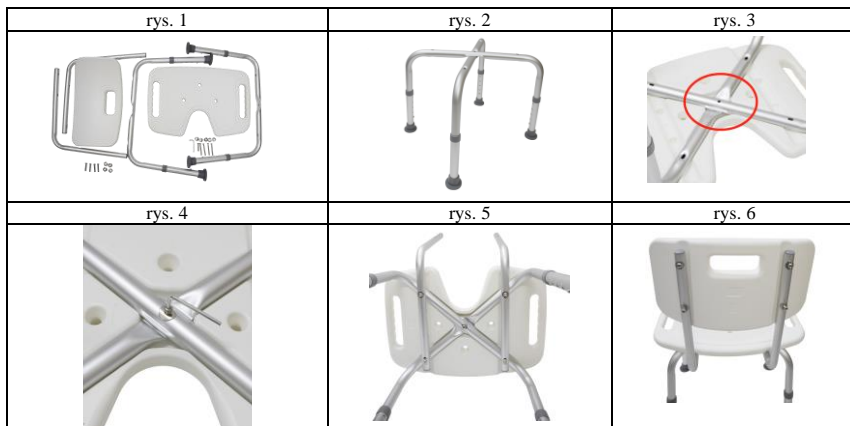

Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę krzesła pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - a. na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub złamania;
 - b. przycisk blokujący prawidłowo zabezpiecza ustawioną wysokość;
 - c. otwory w rurkach nie są powiększone lub wydłużone;
 - d. dolne nasadki nie uległy zużyciu – jeżeli tak, należy je wymienić;
 - e. żadne inne części krzesła nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie krzesła miękką szmatką i wodą z mydłem.
3. Krzesło po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.
4. Przed użyciem sprawdź szczelność śrub i stabilność krzesła.
5. Regularne czyszczenie zapobiegnie zabrudzeniu rurek i zapewni prawidłowe działanie krzesła.













UWAGA! Do czyszczenia krzesła nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Siedzisko	PE (polietylen)
Oparcie	PE (polietylen)
Nasadka	TPR (guma termoplastyczna)
Przycisk blokujący	stal

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie

**REHA FUND Sp. z o.o.**

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.3
Wydano: 04/2022

NOTATKI

KARTA GWARANCYJNA
KRZESŁO DO HIGIENY OSOBISTEJ OLIWIER 810

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęćka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Krzesło jest objęte 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że krzesło było wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH *(wypełnia serwis)*

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					