

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

CHODZIK CZTEROKOŁOWY PALERMO PREMIUM 624

Nr katalogowy:	RF-624
Max. bezpieczne obciążenie:	136 kg
Regulacja wys. uchwytów:	760-950 mm
Ogólna szerokość:	660 mm
Waga:	8.5kg

 **UWAGA!** Przed rozpoczęciem korzystania z chodzika należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Chodzik przeznaczony jest do pomocy dla osób, które wymagają wsparcia podczas chodzenia, w przypadku zmęczenia, zapewnia także możliwość spoczynku. Może być użytkowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Zawsze przed użyciem chodzika upewnić się, że jest on prawidłowo zablokowany w pozycji rozłożonej.
2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia chodzika.
3. Nie przewozić w torbie elementów mocno wystających poza jego obszar, ponieważ może to wpłynąć na stabilność chodzika.
4. Podczas korzystania z chodzika zawsze zachować wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
5. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie chodzika w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
6. Korzystanie z chodzika w środowisku o dużej wilgotności (prysznic, basen itp.) może wywołać korozję jego ruchomych elementów co w efekcie może spowodować uszkodzenie chodzika.
7. Nie korzystać z chodzika podczas chodzenia po schodach.
8. Nie przechowywać chodzika w temperaturze poniżej 0°C.
9. Zawsze należy przestrzegać minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej wysokości rur przesuwanych.
10. Nie wieszaj toreb ani worków na uchwytach - niebezpieczeństwo przewrócenia!
11. Użyj hamulca głównego na stromych powierzchniach.
12. Nigdy nie używaj chodzika do poruszania się, gdy jest złożony!
13. Jeśli zbyt mocno opresz się o uchwyty, chodzik może przechylić się do tyłu.
14. Używanie chodzika do celów innych niż chodzenie, takich jak transport ciężkich ładunków, jest nieodpowiednie i niebezpieczne.

 **UWAGA!** Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.

Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu ustalenia odpowiedniego sposobu korzystania z chodzika, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.

⚠ UWAGA! Poniższa informacja to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.

Jeżeli chodzik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi, wówczas podczas chodzenia część ciężaru ciała przejmuje chodzik.

ELEMENTY CHODZIKA CZTEROKOŁOWEGO PALERMO PREMIUM 624



SKŁADANIE I ROZKŁADANIE CHODZIKA

Aby rozłożyć:

1. Złap jednocześnie dwie rurki mocujące siedziska.
2. Ciągnij rurki w dół tak długo, aż poczujesz opór.
3. Poluzuj śruby blokujące przednich kół i rozłóż koła w dół.
4. Użyj śrub blokujących, aby zablokować koła w tej pozycji.

Aby złożyć:

1. Chwyć rączkę widoczną na składanym siedzisku i pociągnij ją w górę.
2. Ciągnij rączkę w górę tak długo, aż poczujesz opór.
3. Poluzuj śruby blokujące przednich kół i złóż koła do góry.
4. Użyj śrub blokujących, aby zablokować koła w tej pozycji.

MONTAŻ

1. Chodzik jest dostarczany w pełni wyregulowany i zmontowany.

HAMULCE

1. Podczas ruchu hamulce można włączyć poprzez dociśnięcie uchwyty hamulca do rączki chodzika. Każdy hamulec włącza się niezależnie.
2. Każdy z hamulców można zablokować - aby to uczynić, należy pchnąć uchwyt hamulca do dołu. Aby zwolnić zablokowany hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry.

⚠ UWAGA! Przed korzystaniem z chodzika sprawdź czy hamulce działają prawidłowo i czy są dobrze wyregulowane.

REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZKI

1. Wysokość rączek można dostosować do użytkownika.
2. Wciśnij przyciski blokujące na ramie po prawej i po lewej stronie.
3. Pociągnij rurkę w górę do momentu osiągnięcia pożądanego wysokości.
4. Dostępnych jest 8 poziomów regulacji. Przyciski blokujące zatrzymują się automatycznie.

TORBA

1. Torba jest zamontowana na rurce przy siedzisku chodzika.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę chodzika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania
 - przyciski blokujące prawidłowo zabezpieczają ustawioną wysokość rączek
 - przewody hamulców nie są postrzępione
 - hamulce są prawidłowo wyregulowane
 - żadne inne części chodzika nie są poluzowane lub uszkodzone.



UWAGA! Jeśli zachodzi taka konieczność, należy wymienić lub wyregulować odpowiednie części.

1. Zaleca się regularne czyszczenie chodzika miękką szmatką i wodą z mydłem. Chodzik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką.



UWAGA! Do czyszczenia chodzika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściągających.



WYTWÓRCA:

REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03 – 310 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07

e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.1

Wydano: 10/2019

KARTA GWARANCYJNA
CHODZIK CZTEROKOŁOWY PALERMO PREMIUM 624

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęć sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Firma Reha Fund zapewnia Nabywcę, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz dobrej jakości.
2. Sprzęt objęty jest 18-miesięcznym okresem gwarancji.
3. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte bezpłatnie przez producenta, pod warunkiem, że sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
4. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do Punktu Serwisowego. W przypadku potrzeby sprowadzenia części z zagranicy termin naprawy może ulec wydłużeniu o czym Nabywca zostanie niezwłocznie poinformowany.
5. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją czyszczeniem i regulacją sprzętu opisane w instrukcji użytkowania
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania np. elementy gumowe, szyny sprężyny itp.
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia sprzętu np. urwania, stłuczenia, wygięcia, zarysowania itp.
 - wady powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, dokonywanie samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych
6. Przed oddaniem sprzętu do Punktu Serwisowego należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
7. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki, wyłącznie w przypadku, gdy stwierdzono wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.
8. Sprzęt jest przeznaczony do użytku prywatnego. Nie należy go wykorzystywać w siłowniach i klubach kulturystycznych.
9. W przypadku nieuzasadnionego wezwania serwisu, Nabywca będzie obciążony kosztami dojazdu.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

PRZEGLĄD/NAPRAWA *(wypełnia serwis)*

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i Podpis Serwisu
1.					
2.					
3.					