



# Podkład higieniczny

dla dzieci i dorosłych

- + NIEPRZEMAKALNY
- + WIELOKROTNEGO UŻYCIA (ŁATWY W PRANIU)
- + ODPORNY NA DZIAŁANIE ŚRODKÓW ODKAŻAJĄCYCH
- + POSIADA ATEST HIGIENICZNY PZH
- + DOSTĘPNY W DWÓCH KOLORACH: ZIELONY I NIEBIESKI

## ROZMIAR:

70 x 100 cm

70 x 140 cm

140 x 100 cm

140 x 200 cm

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

PODKŁAD HIGIENICZNY 3045

---

### PRZEZNACZENIE

Podkład higieniczny przeznaczony jest do zabezpieczenia powierzchni (np. materaca, łóżka) przed zabrudzeniem wydzielinami fizjologicznymi (np. mocz, krew).

### OPIS PRODUKTU

Wykonany z nieprzemakalnego materiału: powłoka PCW, nośnik PES/BAW.

### CZYSZCZENIE

Myć przy użyciu gąbki zmoczonej w kąpeli wodnej z dodatkiem delikatnego środka piorącego. Materiał można poddawać dezynfekcji parowej w temp. 121°C w czasie 20 minut, min 50 cykli.

### PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować wilgotnego wyrobu bezpośrednio w kontakcie ze skórą.

Nie stosować w przypadku wystąpienia reakcji alergicznych skóry.

Nie stosować, jeśli nastąpiło uszkodzenie mechaniczne wyrobu (np. pęknięcie, rozerwanie).

### OSTRZEŻENIA!

Przed użyciem skonsultować celowość zastosowania, dobór wyrobu i sposób używania z lekarzem lub specjalistą rehabilitantem.

Nie chlorować (nie stosować do bielenia związków wydzielających wolny chlor).

Nie czyścić chemicznie.

Nie prasować (nie dopuszczać do kontaktu z nagrzanymi powierzchniami np. kaloryfer).

Stosować jednostronnie (podkład należy skierować powierzchnią PCW do góry).

### UWAGA!

Pogorszenie właściwości wizualno-estetycznych (typu zmarszczenie powierzchni) nie wpływa na zmianę parametrów użytkowych materiału (właściwości fizykomechanicznych).

---



PRĄC W TEMP.  
MAX. 95°C



NIE  
WYBIELAĆ



NIE  
PRASOWAĆ



MOŻNA SUSZYĆ  
W SUSZARCE



NIE CZYSZCİĆ  
CHEMICZNIE



MYĆ MOKRĄ  
GĄBKĄ

### Wytwórcza:

Reha Fund Sp. z o.o.  
Ul. Staniewicka 14  
03-310 Warszawa

tel. 22 59 40 300

fax 22 59 40 307

info@rehafund.pl

[www.rehafund.pl](http://www.rehafund.pl)

LOT



Wydano  
12/2018