

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA KRZESŁO TOALETOWE BRUNO 801**

<b>Nr katalogowy:</b>	<b>RF-801</b>
<b>Szerokość:</b>	55 cm
<b>Całkowita wysokość:</b>	72~82 cm
<b>Całkowita długość:</b>	72 cm
<b>Wysokość siedziska:</b>	42~52 cm
<b>Głębokość siedziska:</b>	65 cm
<b>Wysokość oparcia siedziska:</b>	33 cm
<b>Max. bezpieczne obciążenie:</b>	100 kg
<b>Waga:</b>	6,6 kg



**UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z krzesła należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.**

**PRZEZNACZENIE**

Krzesło toaletowe służy do przenoszenia pacjenta z łóżka. Krzesła można używać przy łóżku pacjenta. Pomaga osobom o ograniczonej sprawności ruchowej i starszym w podstawowych czynnościach fizjologicznych. Ułatwia też opiekę nad nimi. Barieryki ułatwiają wstawanie z krzesła i siadanie na nim.

**ZASADY BEZPIECZEŃSTWA**

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed korzystaniem z krzesła toaletowego upewnić się, że:
  - wysokość krzesła jest odpowiednio wyregulowana;
  - przyciski blokujące działają poprawnie;
  - gumowe nasadki są w dobrym stanie;
  - wszystkie stopki krzesła ustawione są na tej samej wysokości.
2. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie krzesła w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
3. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia krzesła.
4. Nie przechowywać krzesła w temperaturze poniżej 0°C.
5. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



**UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.**

**SIADANIE I WSTAWANIE**

1. Upewnij się, że krzesło stoi stabilnie i jest gotowe do użycia.
2. Stań tyłem do krzesła tak, aby dotykać jego przodu, tylną stroną kolan.
3. Sięgnij rękoma do tyłu i oprzyj dłonie na podłokietnikach.
4. Powoli siadaj na krzesło, zginając łokcie i jeśli jest to możliwe kolana oraz biodra.
5. Aby wstać z krzesła, oprzyj dłonie na poręczach i podnieś się. Zanim puścisz podłokietniki krzesła, upewnij się, że utrzymujesz równowagę.

**CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

1. Zaleca się regularną kontrolę krzesła pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:



- na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
  - nasadki nie uległy zniszczeniu – jeżeli tak, należy je wymienić;
  - żadne inne części krzesła toaletowego nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie krzesła toaletowego miękką szmatką i wodą z mydłem. Krzesło toaletowe po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Wiaderko można dezynfekować na zimno np. etanolem.



**UWAGA! Do czyszczenia krzesła nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających.**

## MONTAŻ

1. Produkt jest przeznaczony do samodzielnego montażu bez użycia narzędzi.
2. Przed montażem sprawdź listę części (rys.1).
3. Rozłóż ramę.
4. Ustaw ramę w na stabilnej i równej powierzchni.
5. Połącz przeciwległe końce ramy poprzeczką stabilizującą.
6. Włóż wiaderko do konstrukcji.
7. Przykryj wiaderko pokrywką.
8. Zamontuj deskę i klapkę.

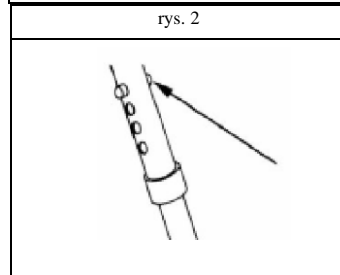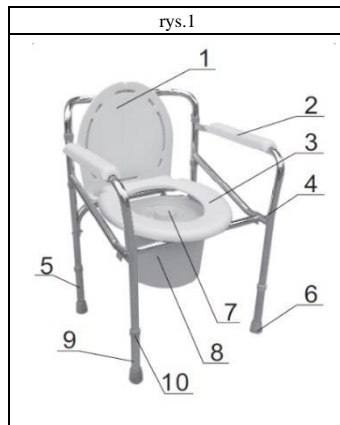

Lista części	
1. klapka	6. nasadka
2. podłokietnik	7. pokrywka
3. deska toaletowa	8. wiaderko
4. poprzeczka stabilizująca	9. regulacja wysokości
5. przycisk blokujący	10. nasadka stabilizująca











## REGULACJA WYSOKOŚCI

Możesz regulować wysokość za pomocą przycisków blokujących znajdujących się w nogach krzesła. Wciśnij przycisk blokujący jedną ręką (rys.2), drugą przesuń rurkę do odpowiedniej wysokości. Zatrzaśnij przycisk blokujący.

## LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

klapka	PP (polipropylen)
podłokietnik	PP (polipropylen)
deska toaletowa	PP (polipropylen)
rama	stal
przycisk blokujący	stal
nasadka	guma
pokrywka	PP (polipropylen)
wiaderko	PP (polipropylen)
nasadka stabilizująca	PP (polipropylen)

## WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie



**REHA FUND Sp. z o.o.**

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska  
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07  
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Wer. 1.2  
Wydano: 02/2021

#### NOTATKI

## KARTA GWARANCYJNA KRZESŁO TOALETOWE BRUNO 801

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęćka sprzedawcy:

### WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Krzesło jest objęte 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że krzesło było wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
  - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją krzesła opisane w instrukcji użytkowania;
  - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
  - mechaniczne i termiczne uszkodzenia krzesła np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
  - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

### WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH *(wypełnia serwis)*

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu

1.					
2.					