

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
CHODZIK CZTEROKOŁOWY OSLO PREMIUM 616**

Nr katalogowy:	RF-616
Max. bezpieczne obciążenie:	136 kg
Regulacja wysokości uchwyty:	81-91 cm
Szerokość po rozłożeniu:	65 cm
Szerokość po rozłożeniu podnóżka:	88 cm
Szerokość po złożeniu:	23 cm
Całkowita długość:	66 cm
Średnica koła:	19 cm
Grubość opony koła:	3,9 cm
Średnica rurki ramy:	2,5 cm
Grubość rurki ramy:	1,4 mm
Waga:	8,2 kg



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z chodzika należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Chodzik przeznaczony jest do pomocy dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, które wymagają wsparcia podczas wstawania, stania i chodzenia. Umożliwia samodzielną realizację większości codziennych czynności ruchowych. Może być użytkowany w pomieszczeniach i na zewnątrz.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Zawsze przed użyciem chodzika upewnić się, że jest on prawidłowo zablokowany w pozycji rozłożonej.
2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia chodzika.
3. Nie przewozić w koszyku elementów mocno wystających poza jego obszar, ponieważ może to wpłynąć na stabilność chodzika.
4. Podczas korzystania z chodzika zawsze zachować wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
5. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie chodzika w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
6. Korzystanie z chodzika w środowisku o dużej wilgotności (prysznic, basen itp.) może wywołać korozję jego ruchomych elementów, co w efekcie może spowodować uszkodzenie chodzika.
7. Nie korzystać z chodzika podczas chodzenia po schodach oraz schodach ruchomych.
8. Nie przechować chodzika w temperaturze poniżej 0°C. Nie wystawiać chodzika na długi czas w temperaturze powyżej 40°C, ponieważ może to spowodować przegrzanie elementów chodzika i poparzenie użytkownika.
9. Zawsze należy przestrzegać minimalnej i maksymalnej dopuszczalnej wysokości rur przestawnych.
10. Nie wieszaj toreb ani worków na uchwytych - niebezpieczeństwo przewrócenia!
11. Użyj hamulca głównego na stromych powierzchniach.
12. Nigdy nie używaj chodzika do poruszania się, gdy jest złożony!
13. Jeśli zbyt mocno oprzesz się o uchwyty, chodzik może przechylić się do tyłu.
14. Używanie chodzika do celów innych niż chodzenie, takich jak transport ciężkich ładunków, jest nieodpowiednie i niebezpieczne.
15. Stosować na różnych i twardych powierzchniach.
16. Nie stosować jako zamiennik wózka inwalidzkiego.
17. Nie używać na pochylonym terenie.
18. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania.



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpieczeństwa może doprowadzić do poważnych wypadków.



UWAGA! Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu ustalenia odpowiedniego sposobu korzystania z chodzika, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.



UWAGA! Poniższa informacja to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.



UWAGA! Jeżeli chodzik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi, wówczas podczas chodzenia część ciężaru ciała przejmuje chodzik.

ELEMENTY CHODZIKA I MONTAŻ

Elementy chodzika są przedstawione na rys. nr 1.

Montaż:

1. Wyciągnij z kartonu wszystkie części: oparcie, uchwyty z rurek, ramę chodzika oraz koszyk.
2. Otwórz ramę chodzika i rozłóż podnóżek. Przyłóż do ramy oparcie i sprawdź, czy otwory do montowania na ramie i oparciu są widoczne. Wkręć śruby montujące.
3. Włóż do ramy uchwyty z rurek i ustaw odpowiednią wysokość rączek. Wkręć motylki mocujące.

SKŁADANIE I ROZKŁADANIE CHODZIKA

Aby rozłożyć:


1. Pociągnij w dół siedzisko do momentu aż rama całkowicie się rozłoży i poczujesz opór.
2. Zamontuj koszyk i przykryj go siedziskiem.

Aby złożyć:

1. Podnieś siedzisko i wyjmij koszyk.
2. Złóż ramę ciągnąc siedzisko do góry.

HAMULCE

1. Podczas ruchu hamulce można włączyć poprzez dociśnięcie uchwyty hamulca do rączki chodzika. Każdy hamulec włącza się niezależnie.
2. Każdy z hamulców można zablokować - aby to uczynić, należy pchnąć uchwyt hamulca do dołu. Aby zwolnić zablokowany hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry.

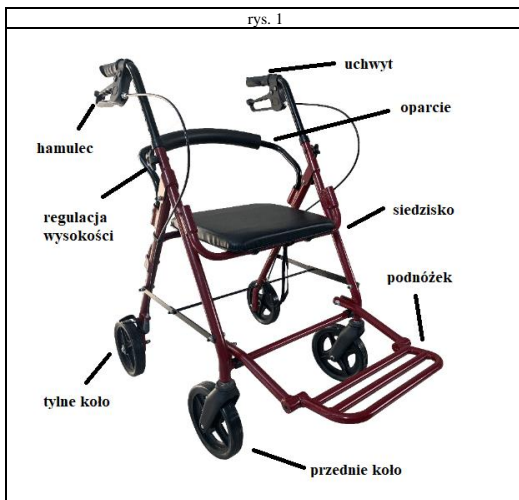

UWAGA! Przed korzystaniem z chodzika sprawdź czy hamulce działają prawidłowo i czy są dobrze wyregulowane. Upewnij się, że hamulce są zablokowane, gdy użytkownik siedzi na siedzisku. Na działanie hamulców może wpływać ścieranie kół.

REGULACJA WYSOKOŚCI RĄCZKI

1. Wysokość rączek można dostosować do użytkownika.
2. Wykręć motylki mocujące z ramy po prawej i lewej stronie.
3. Pociągnij rurkę w górę lub w dół do momentu osiągnięcia pożądanej wysokości.
4. Przykręć motylki mocujące.

KOSZYK

1. Koszyk można zamontować w środku ramy oraz na przodzie ramy. Koszyk jest odczepiany, co ułatwia transport i czyszczenie. Maksymalne obciążenie koszyka to 5 kg.

FUNKCJA TRANSPORTOWA

Chodzik posiada funkcję transportową pozwalającą na przewożenie użytkownika na chodziku przez asystenta. Aby skorzystać z funkcji transportowej, należy przelozyc oparcie na przeciwną stronę niż przy korzystaniu z chodzika samodzielnie oraz rozłożyć podnóżki. Oparcie powinno znajdować się po przeciwnej stronie niż podnóżki, a rączki powinny być skierowane w stronę oparcia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę chodzika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania;
 - śruby są prawidłowo dokręcone;
 - przyciski blokujące prawidłowo zabezpieczają ustawioną wysokość rączek;
 - przewody hamulców nie są postrzępione;
 - hamulce są prawidłowo wyregulowane;
 - żadne inne części chodzika nie są poluzowane lub uszkodzone.



UWAGA! Jeśli zachodzi taka konieczność, należy wymienić lub wyregulować odpowiednie części. W razie potrzeby należy nasmarować części mechaniczne.



UWAGA! Zaleca się regularne czyszczenie chodzika miękką szmatką i wodą z mydłem. Chodzik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Do czyszczenia chodzika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ścierających. Urządzenie można dezynfekować alkoholem lub pochodnymi, ale o niskim stężeniu.

LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama	aluminium
Koła	PVC (polichlorek winylu) +PP (polipropylen)
Uchwyty	PVC (polichlorek winylu)
Koszyk	Stal
Przedni widelec	PP (polipropylen)
Hamulec	PP (polipropylen) + aluminium + stal

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie



REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska
tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07
e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl



Ver. 1.3
Wydano: 02/2021

NOTATKI

**KARTA GWARANCYJNA
CHODZIK CZTEROKOŁOWY OSLO PREMIUM 616**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęćka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Chodzik jest objęty 12 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, że sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.;
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					