

**INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
BALKONIK HARRY Z LAWECZKĄ I ZESTAWEM TOALETOWYM 133
WYRÓB MEDYCZNY**

Nr katalogowy:	RF-133
Regulacja wysokości:	81-99 cm
Szerokość ramy:	52 cm
Szerokość zestawu toaletowego:	40 cm
Szerokość laweczki:	41 cm
Wysokość siedziska:	46 cm
Max. bezpieczne obciążenie:	100 kg
Waga:	5,9 kg



UWAGA! Przed rozpoczęciem korzystania z balkonika należy uważnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami.

PRZEZNACZENIE

Balkonik przeznaczony jest dla osób starszych i niepełnosprawnych ze schorzeniami narządów ruchu lub z problemem pionizacji. Może być użytkowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Pomaga w codziennych czynnościach, np. wstawaniu z łóżka, chodzeniu, korzystaniu z toalety, spacerze.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Dla zachowania bezpieczeństwa należy przestrzegać poniższych zaleceń:

1. Przed użyciem balkonika każdorazowo sprawdź czy:
 - balkonik ustawiony jest na prawidłową wysokość;
 - mechanizm blokujący i przyciski do regulacji wysokości są prawidłowo zabezpieczone;
 - wszystkie stopki balkonika są ustawione na taką samą wysokość;
 - nasadki na stopkach nie są zużyte – jeżeli tak to wymień je.
2. Nie przekraczać maksymalnego dopuszczalnego obciążenia balkonika.
3. Podczas korzystania z balkonika zawsze zachowywać wyjątkową ostrożność. Należy unikać wszelkich potencjalnych zagrożeń takich jak: nierówne lub miękkie powierzchnie, przeszkody na drodze, mokra podłoga itp.
4. Korzystać wyłącznie z oryginalnych akcesoriów. Używanie nieoryginalnych części może spowodować nieodpowiednie przystosowanie balkonika w wyniku czego powstaje ryzyko upadku.
5. Nie przechować balkonika w temperaturze poniżej 0°C.
6. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego, w którym użytkownik lub pacjent mają miejsce zamieszkania



UWAGA! Nieprzestrzeganie powyższych zasad bezpiecznego użytkowania może doprowadzić do poważnych wypadków.



UWAGA! Skonsultuj się ze swoim lekarzem lub rehabilitantem w celu wyboru odpowiedniego balkonika i akcesoriów oraz sposobu korzystania, zgodnie z Twoimi możliwościami funkcjonalnymi i czynnościami dnia codziennego.




UWAGA! Poniższe zalecenie to zalecenie producenta, jednak powinno być ono skonsultowane z twoim lekarzem lub rehabilitantem.



UWAGA! Jeżeli balkonik jest prawidłowo wyregulowany, użytkownik powinien być w stanie zachować wyprostowaną postawę z lekko zgiętymi stawami łokciowymi. Wówczas podczas chodzenia ciężar ciała przejmują rama balkonika.


ELEMENTY BALKONIKA

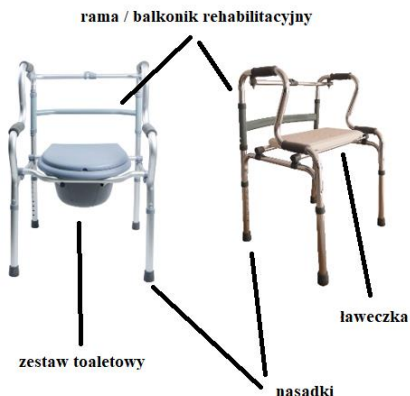

Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy.

SPOSÓB MONTAŻU

1. Produkt jest przeznaczony do samodzielnego montażu bez użycia narzędzi.
2. Naciśnij dźwignię blokującą na ramie / balkoniku rehabilitacyjnym (rys. 1).
3. Rozłóż pierwszy bok ramy / balkonika rehabilitacyjnego (rys. 2).
4. Rozłóż całą ramę / balkonik rehabilitacyjny (rys. 3).
5. W zależności od potrzeby, zamontuj zestaw toaletowy lub ławeczkę (rys. 4).
6. Wyreguluj wysokość (rys. 5).
7. Ustaw złożony produkt w odpowiednim miejscu (rys. 6).

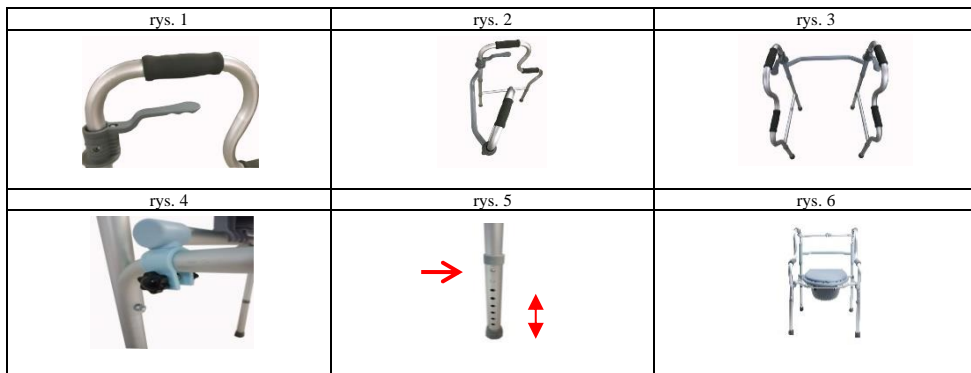

Powyższe zdjęcia mają charakter poglądowy.

FUNKCJE BALKONIKA

Balkonik posiada 3 funkcje:

- przestawną – ramę przestawia się w czasie chodzenia;
- z kółkami – dla ułatwienia na przednie nogi można zamontować koła, które są dostępne w standardzie; w czasie chodzenia ramę przesuwa się do przodu za pomocą kół;
- wspomaganie w czasie wstawania – rama balkonika posiada uchwyty na dwóch wysokościach.

REGULACJA WYSOKOŚCI

Możesz regulować wysokość za pomocą przycisków blokujących znajdujących się w nogach balkonika. Wciśnij przycisk blokujący jedną ręką, drugą przesuń rękę do odpowiedniej wysokości. Zatrzasknij przycisk blokujący.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Zaleca się regularną kontrolę balkonika pod kątem wszelkich uszkodzeń czy widocznych oznak zużycia. Regularnie sprawdzaj czy:
 - na ramie nie pojawiły się pęknięcia lub załamania,

- nasadki nie uległy zniszczeniu – jeżeli tak, należy je wymienić,
 - żadne inne części balkonika nie są poluzowane lub uszkodzone.
2. Zaleca się regularne czyszczenie balkonika miękką szmatką i wodą z mydłem. Balkonik po wyczyszczeniu należy osuszyć miękką szmatką. Wiaderko można dezynfekować na zimno np. etanolem.



UWAGA! Do czyszczenia balkonika nie wolno używać rozpuszczalników, wybielaczy czy środków ściernych.

LAWECZKA I ZESTAW TOALETOWY

W skład balkonika wchodzi laweczka (rys. 8) i zestaw toaletowy (rys. 7). Te elementy należy stosować w zależności od potrzeb użytkownika.



LISTA UŻYTYCH MATERIAŁÓW

Rama / balkonik rehabilitacyjny	stal + aluminium
Ławeczka	PE (polietylen) + PP (polipropylen)
Zestaw toaletowy	PE (polietylen) + PP (polipropylen)
Nasadki	TPR (guma termoplastyczna)
Uchwyty	pianka
Koła	PVC (polichlorek winylu)
Przycisk blokujący	stal

WYJAŚNIENIE SYMBOLI

	Producent
	Oznakowanie CE
	Numer referencyjny
	Data produkcji
	Zajrzyj do instrukcji używania
	Ostrzeżenie
	Numer serii
	Góra, nie przewracać
	Przechowywać w suchym miejscu
	Delikatne, obchodzić się ostrożnie





REHA FUND Sp. z o.o.

ul. Staniewicka 14, 03-310 Warszawa, Polska

tel.: +48 22 594 03 00, fax.: +48 22 594 03 07

e-mail: info@rehafund.pl www.rehafund.pl

Wer. 1.2

Wydano: 04/2022

**KARTA GWARANCYJNA
BALKONIK HARRY Z LAWECZKĄ I ZESTAWEM TOALETOWYM 133**

Model:	Numer seryjny:	Data sprzedaży:	Podpis i pieczęćka sprzedawcy:

WARUNKI GWARANCJI

1. Producent zapewnia klienta, że przedmiot sprzedaży, na który jest wydana niniejsza karta gwarancyjna jest fabrycznie nowy oraz wysokiej jakości.
2. Krzesło jest objęte 24 miesięcznym okresem gwarancji od daty sprzedaży w karcie gwarancyjnej.
3. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji gwarancyjnej jest dostarczenie poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej wraz z dołączonym dowodem zakupu.
4. Ewentualne wady sprzętu zostaną usunięte przez firmę REHA FUND Sp. z o.o. lub autoryzowanych serwisantów pod warunkiem, sprzęt był wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami w instrukcji użytkowania.
5. Naprawa zostanie wykonana w możliwie najkrótszym terminie, nie przekraczającym 14 dni, od daty przyjęcia sprzętu do punktu serwisowego.
6. Gwarancją nie są objęte:
 - czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacją opisane w instrukcji użytkowania;
 - części ulegające zużyciu podczas normalnego użytkowania;
 - mechaniczne i termiczne uszkodzenia np. wygięcia, zarysowania, połamania itp.
 - uszkodzenia powstałe wskutek używania sprzętu niezgodnie z instrukcją obsługi, zaniedbania, dokonania samodzielnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
7. Przed oddaniem sprzętu do autoryzowanych serwisantów należy go wyczyścić zgodnie z instrukcją użytkowania, tak aby nadawał się do wykonania przeglądu serwisowego.
8. Naprawy i wymiany części zamiennych powinny być wykonane przez autoryzowanych serwisantów firmy Reha Fund Sp. z o.o.
9. W przypadku nieuzasadnionego zgłoszenia reklamacyjnego klient będzie obciążony kosztami przesyłki.
10. Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

WYKAZ NAPRAW SERWISOWYCH (wypełnia serwis)

Lp.	Data zgłoszenia	Nr zlecenia	Opis wady/ Zakres naprawy	Data wykonania naprawy	Pieczęć i podpis serwisu
1.					
2.					